

DICOMデータを削除する方法のご説明

患者の名前の上で「右クリック」しスタディ管理のメニューから削除を「左クリック」して下さい。

患者ID	RAJ	患者ID	患者名	検査時間	年齢	性別	部位
1	P	4485	黄田 健二 [タカケン]	2006/07/07 17:38:18	61	M	インプラント
2	P	00000189	黄田 智カダ ナオ		24	M	両膝関節
3	P	1021	黄田 智カダ ナオ		24	M	踵穴歯
4	P	1021	黄田 智カダ ナオ		24	M	両腕関節
5	P	1021	黄田 智カダ ナオ		25	M	両脚
6	P	77777	黄田 智カダ ナオ		24	M	右手
7	P	999998	黄田 智カダ ナオ		25	M	第一頸椎
8	R	1021	黄田 智カダ ナオ				黄田 慶典
9	R	1021	黄田 智カダ ナオ				黄田 慶典2
10	R	999998	黄田 智カダ ナオ				
11	R	9999997	黄田 智カダ ナオ				アノニム

下記のメッセージが出てきたら OK をクリックして下さい。



ユーザー名: **scan** パスワード: **scan** と入力し OK をクリックして下さい。
選択したデータが削除されます。