


4.7.3 検査データベースに別名(任意の名前)で保存する

1

#	R/U	患者 ID	患者名	検査時間
	R	25 813 1 9	HitoKouikiH...	2006/07/25 16:15:39

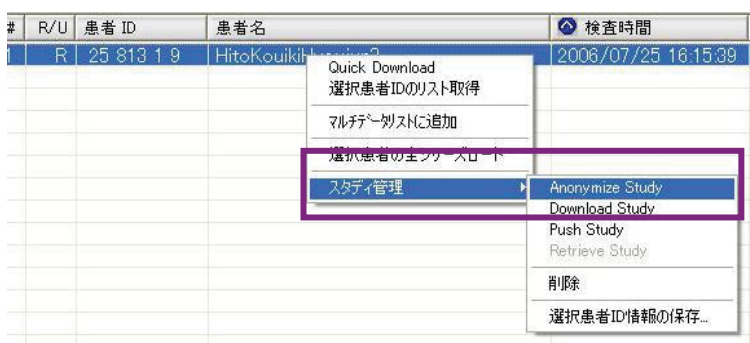


操作

保存する検査上で右クリックし、「スタディ管理」→「Anonymize Study」をクリックします。

補足

- ・ シリーズを保存する場合は、保存するシリーズ上で右クリックし、「シリーズ管理」→「Anonymize Series」をクリックします。

2

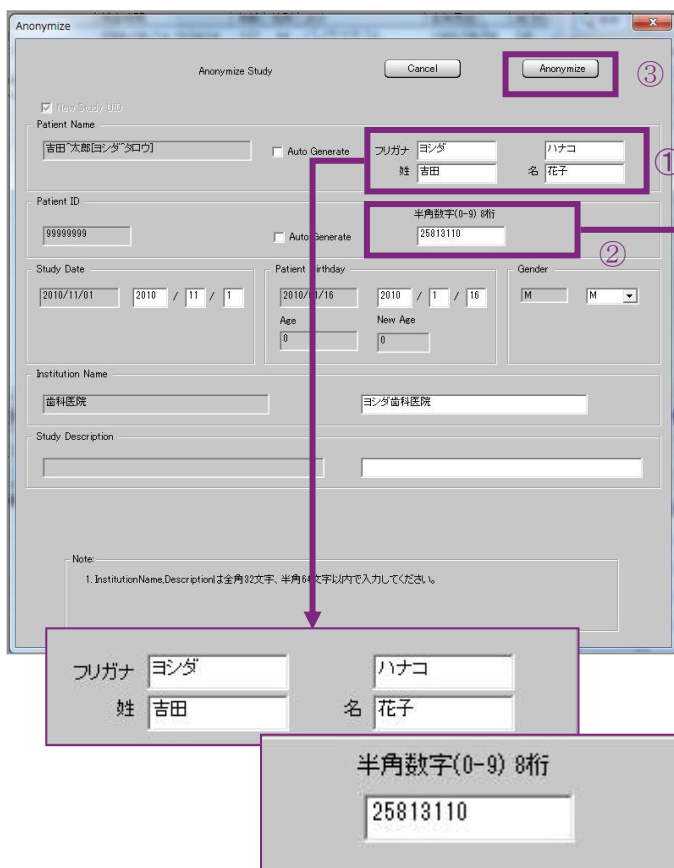

操作

「Anonymize Study」画面が表示されます。

1. 新たな患者名を入力します。
2. 新たな患者 ID の番号を入力します。
3. [Anonymize]ボタンをクリックします。

注意

- ・ Anonymize(別名/任意の名前)するデータは、検査データベースに新たな検査データとして登録されます。既存のデータはそのまま変更されずに残ります。


補足

- ・ 別名や別の患者 ID を指定して入力する場合は、上記手順で設定してください。匿名や自動的に患者 ID を生成する場合は、次項の手順を参照ください。

▶ 匿名で保存する⇒「4.7.4 検査データベースに別名(匿名)で保存する」④-30ページを参照

- ・ 患者 ID は数字 0~9 を 8 桁以下で入力してください。


3

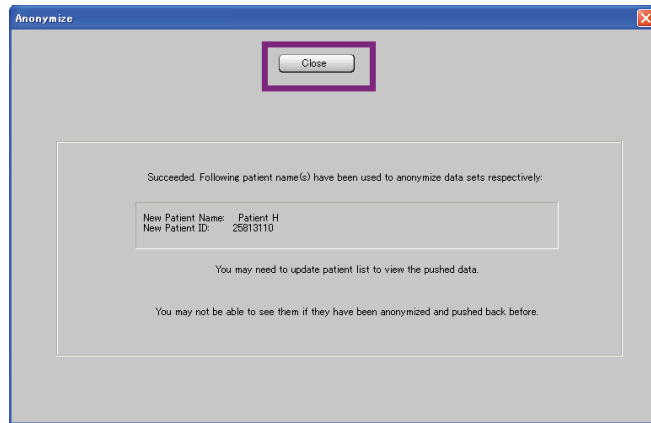

操作

しばらくして完了メッセージが表示されます。[Close]ボタンをクリックします。

4

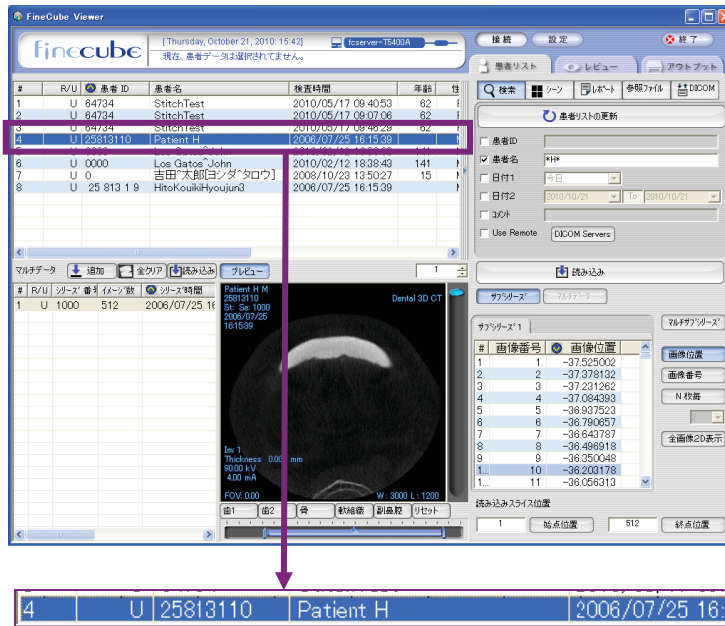

操作

検査データが保存されます。
[患者リストの更新]ボタンをクリックすると、スタディリストが更新され、新たに保存された検査データが表示されます。