



# CDRにデータを焼きたい

- ①患者履歴から必要な画像を左クリックし、  
必要な画像に緑の枠を付けて、右下の「送信先」を選択

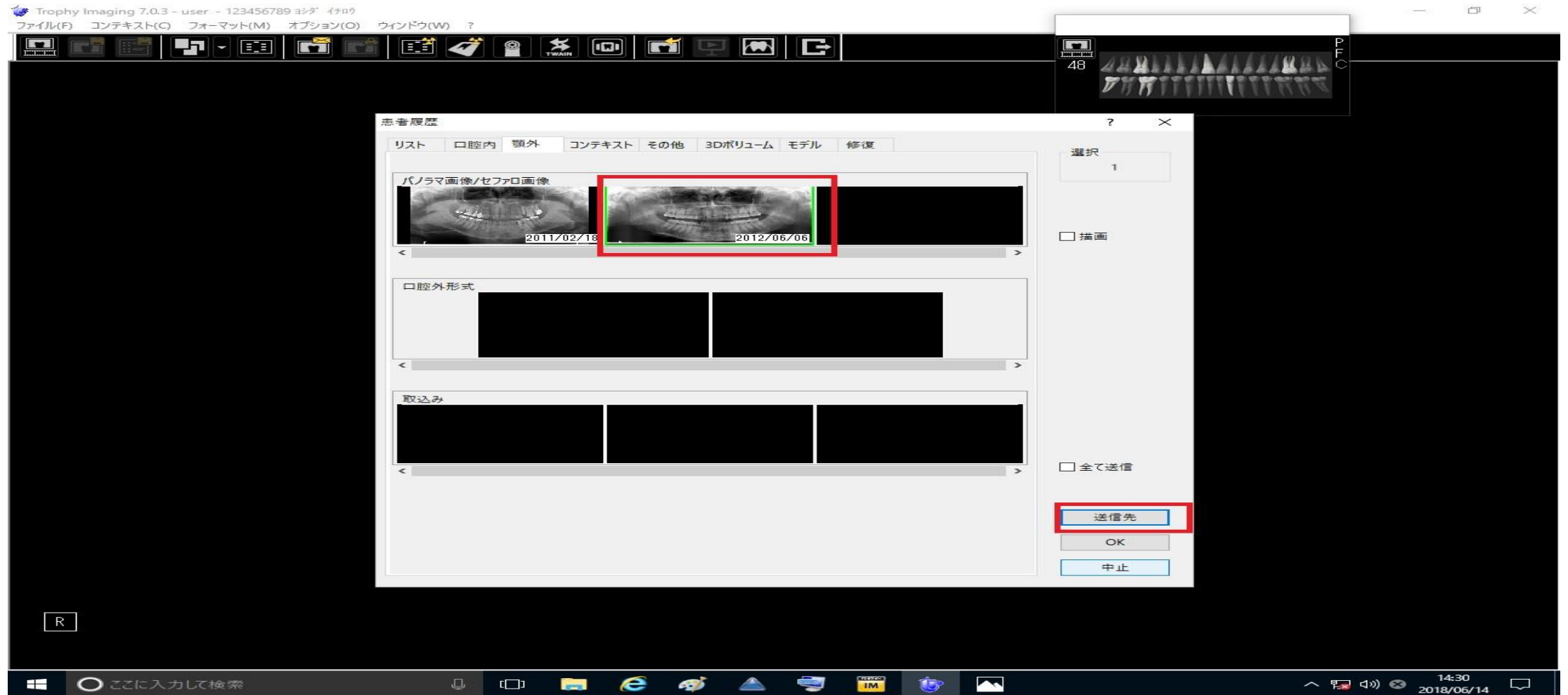

# CDRにデータを焼きたい



- ①エクスポートの画面が出たら、  
「フォルダの場所」にチェックを入れる
- ② 右側の選択から「デスクトップ」を選択
- ③「フォルダの場所」を決定したら、  
「選択」の下にある「ファイル形式」が、  
「JPEG」になっているか確認
- ④「JPEG」になっていれば右下の「OK」を選択

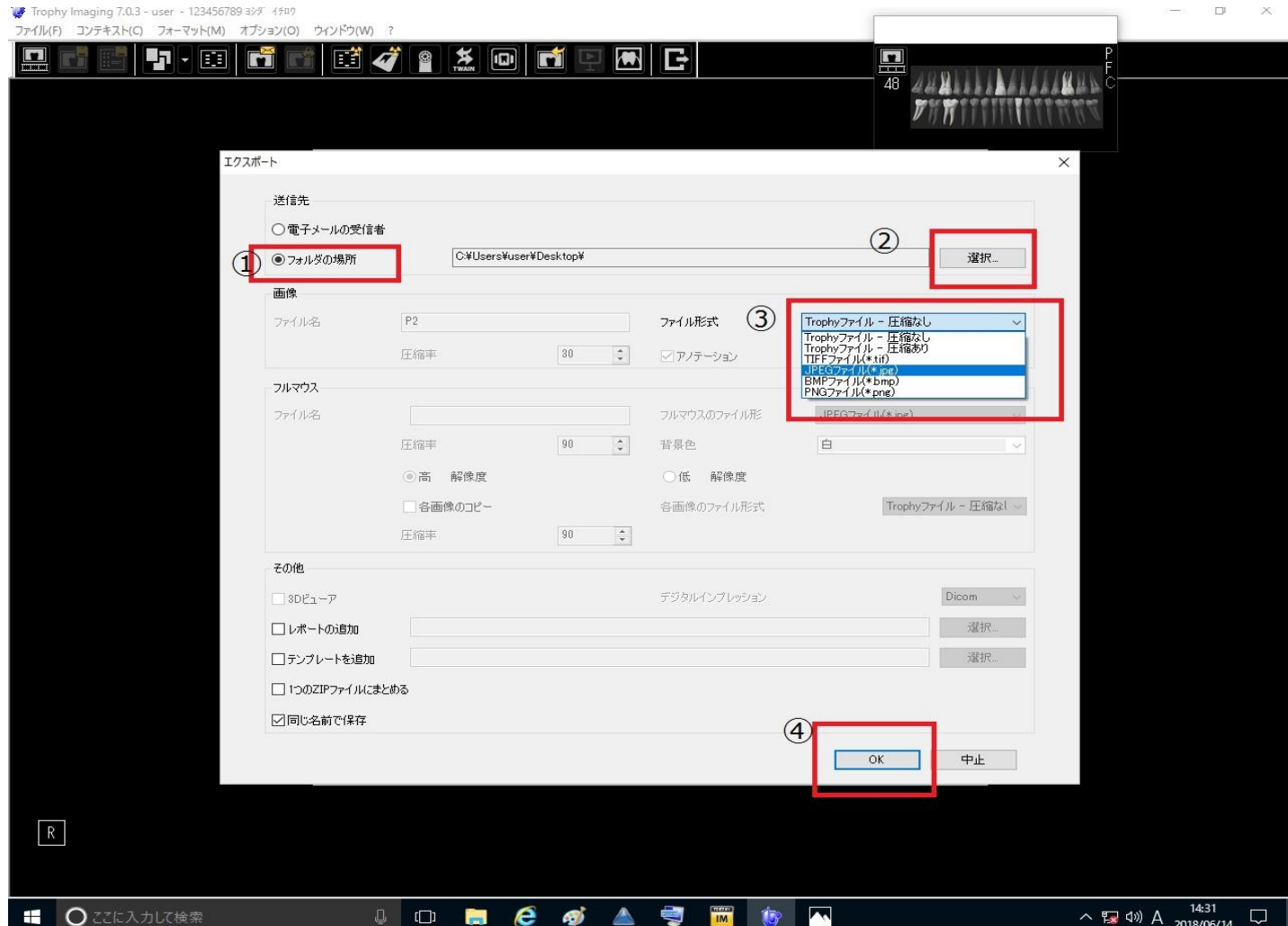

# CDRにデータを焼きたい

DVD-RWドライブをダブルクリックして下さい。


CD/DVDプレイヤーで使用するにチェックを入れて「次へ」を選択下さい。

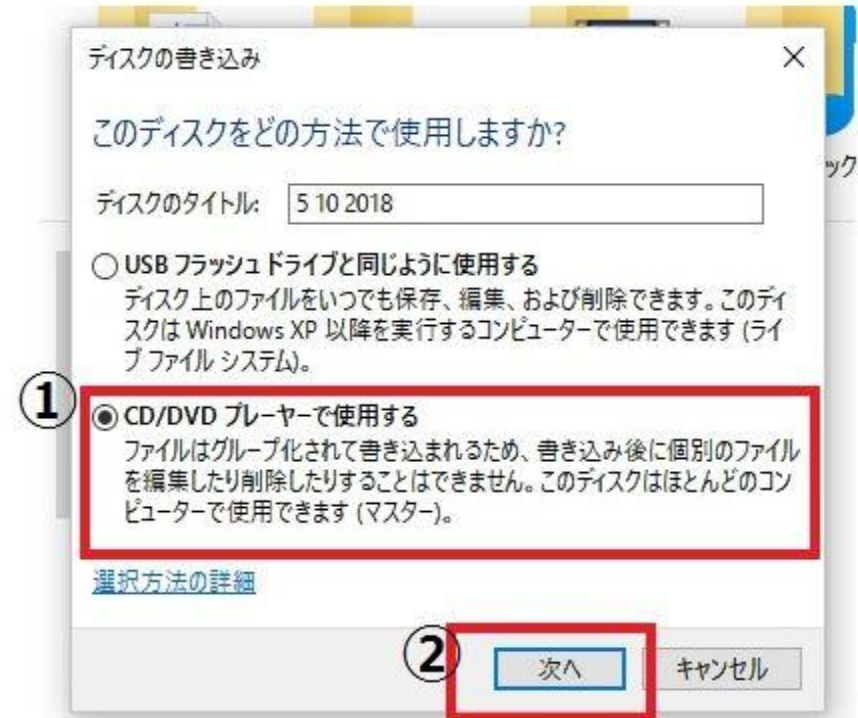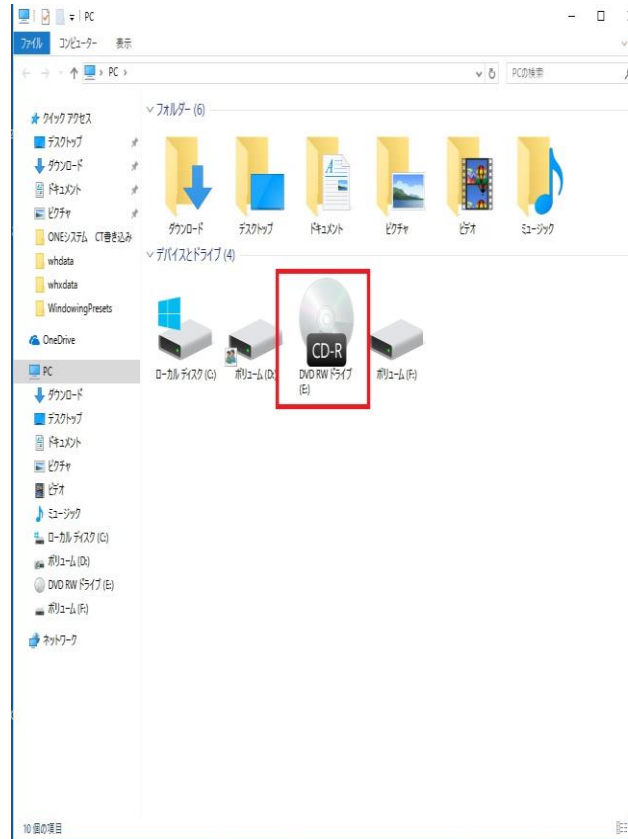

# CDRにデータを焼きたい

コピーしたいファイルをドラッグ & ドロップしてください

(左クリックをずっと押した状態でフォルダーの上に持っていく、フォルダーの上で左クリックを離す)

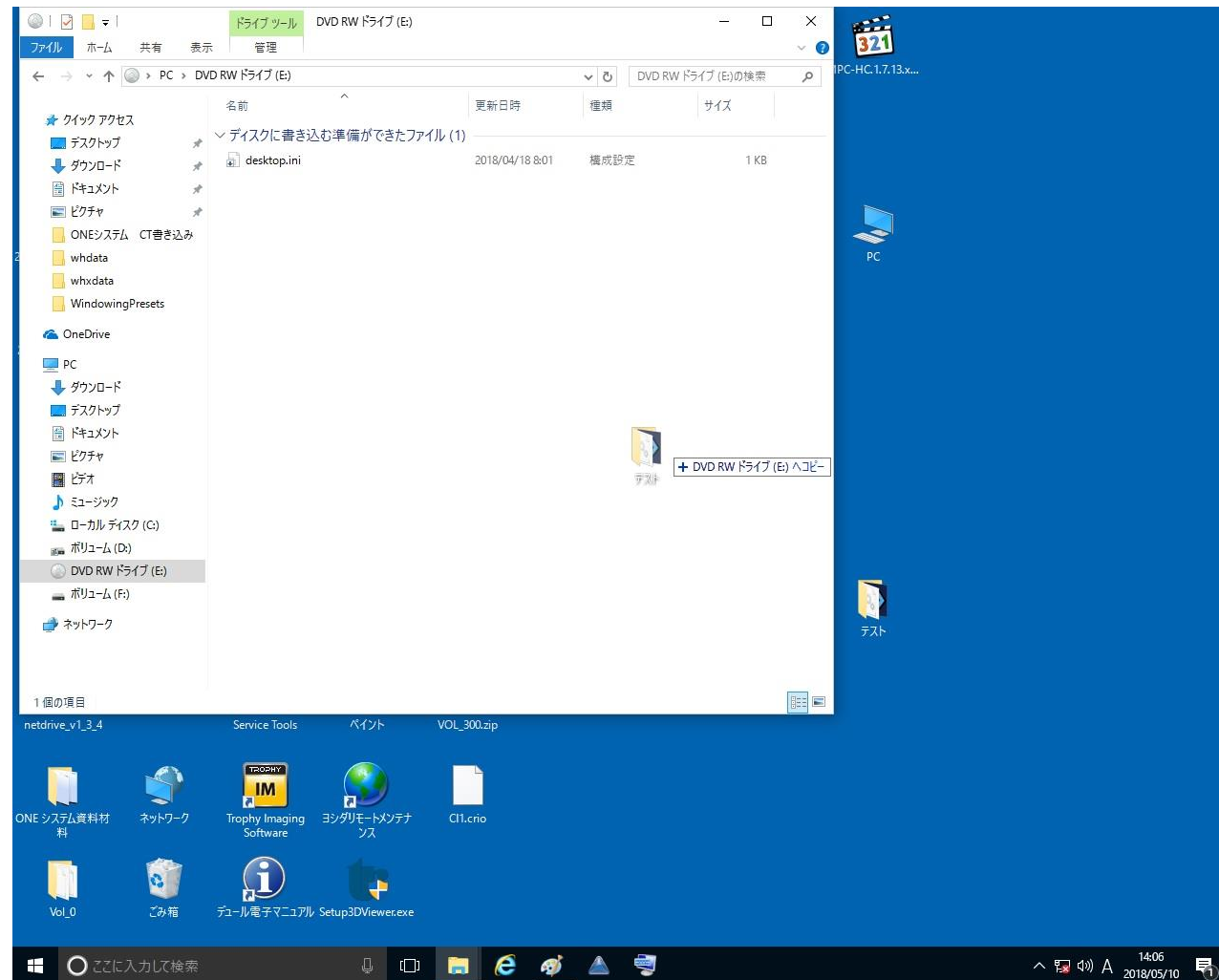

# CDRにデータを焼きたい

管理を選択し、「書き込みを完了」を押す



# CDRにデータを焼きたい

「ディスクの書き込み」が出てきたら  
右下の「次へ」を選択し、  
書き込みが完了すると右下に「完了」  
と出るので完了を押すと完了。

