


患者を間違えて画像保存した(移動したい)


<パート1>

TrophyWindows ... (1)画像移動 + (2)元画像削除

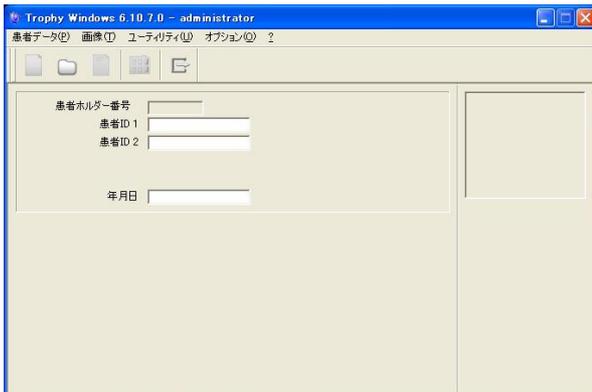


(1) 画像の移動

- ① 「間違えた患者さん」を「検索」で呼びだして、撮影画面に切り替えます。

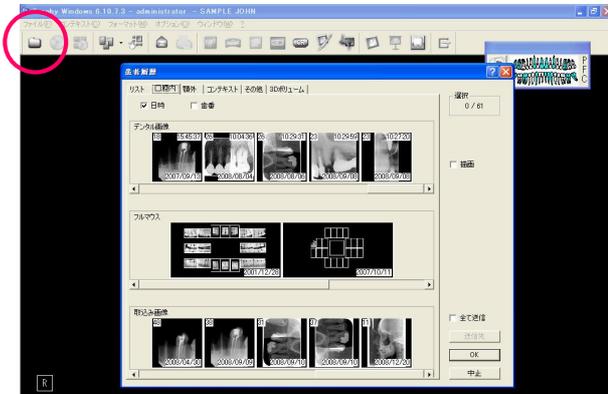

- ② 「履歴を開く」で画像一覧を表示します。

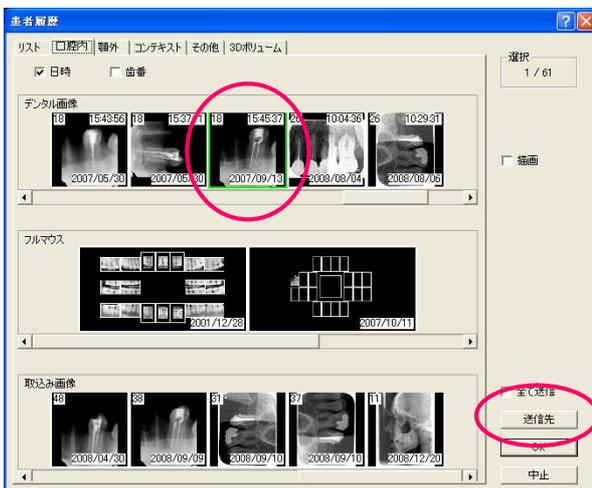


- ③ 移動したい画像を左クリックして緑色の枠を付けます。

※複数枚ある際は該当する画像に緑色の枠を付けて下さい。


- ④ 右下の「送信先」を左クリックします。

患者を間違えて画像保存した(移動したい)

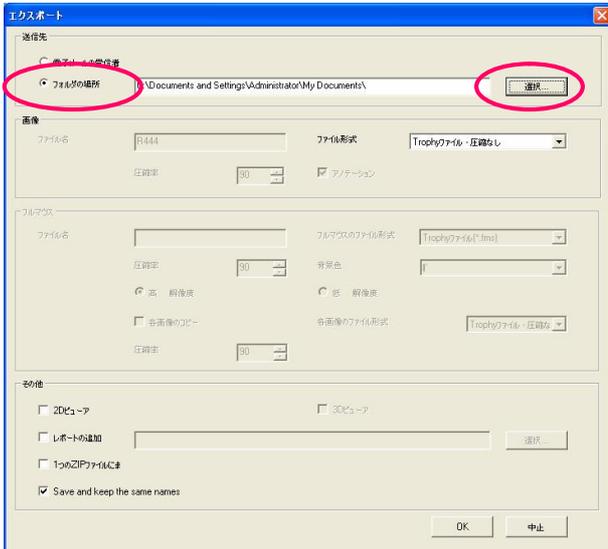


⑤ 左上の「送信先」では「フォルダの場所」の方にチェックを入れます。

⑥ フォルダの場所を設定しますので右側の「選択」をクリックします。

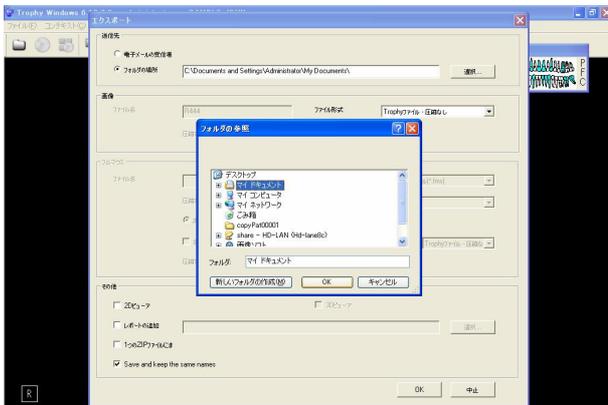


⑦ 「フォルダの参照」画面では「マイドキュメント」を選択します。

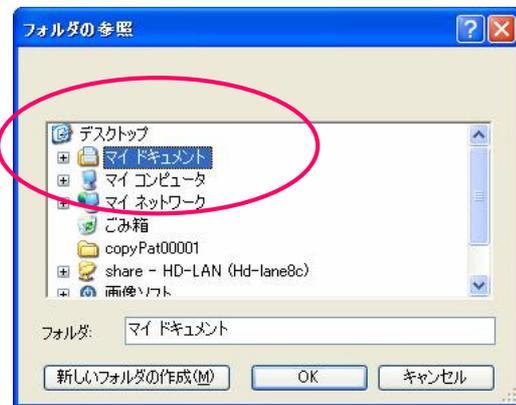


⑧ ファイル名を控えておきます。

⑨ 右下の「OK」をクリックします。

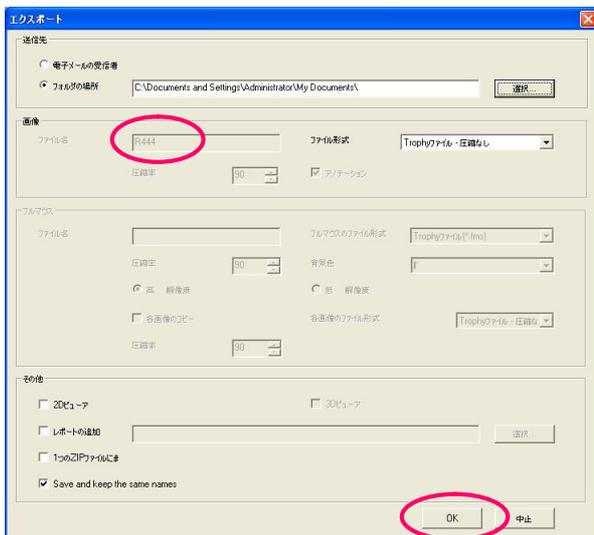


TrophyWindows


患者を間違えて画像保存した(移動したい)

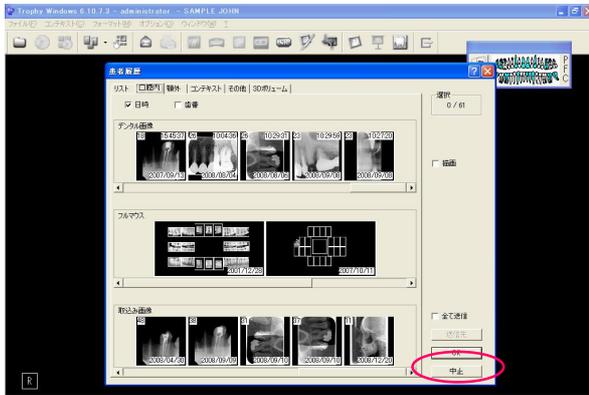


- ⑩ 右下の「中止」を左クリックして画面を閉じてください。

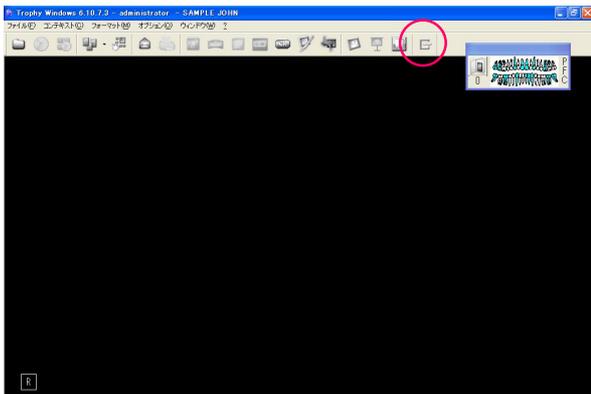

- ⑪ 「終了」ボタンを左クリックして、撮影画面を閉じてください。

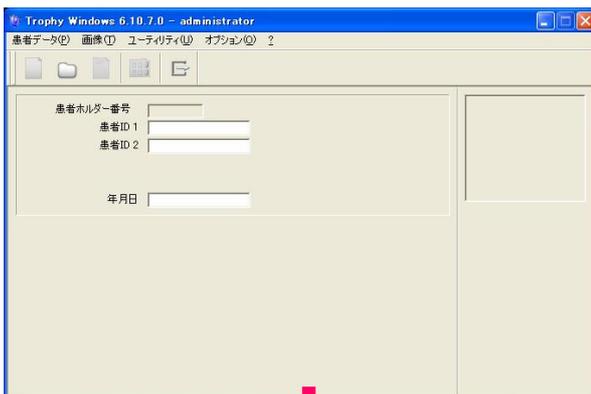


- ⑫ 「画像を入りたい患者さん」を「検索」で呼びだして、撮影画面に切り替えます。

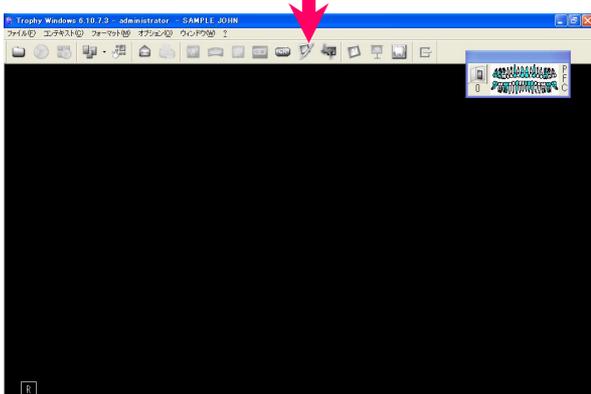


TrophyWindows


患者を間違えて画像保存した(移動したい)

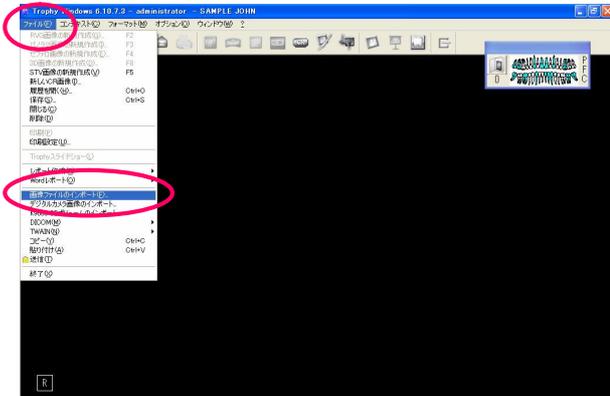


- ⑬ 左上にある「ファイル(F)」を左クリックし、「画像ファイルのインポート(F)」を左クリックします。

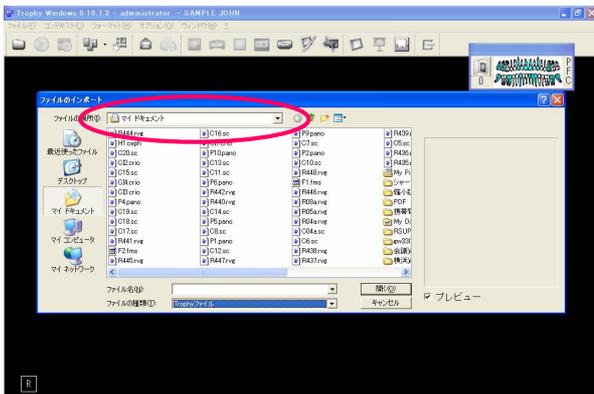

- ⑭ 上部の「ファイルの場所(I)」の右側にある▼ボタンを左クリックします。一覧が表示されますので「マイドキュメント」を選択します。

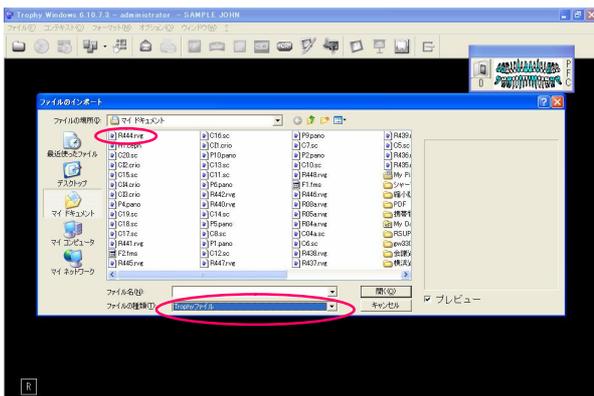


- ⑮ 下部の「ファイルの種類(T)」の右側にある▼ボタンを左クリックします。一覧が表示されますので「Trophyファイル」を選択します。
- ⑯ 「マイドキュメント」内の「Trophyファイル」が白枠内に表示されますので、⑧で控えたファイル名を選択します。

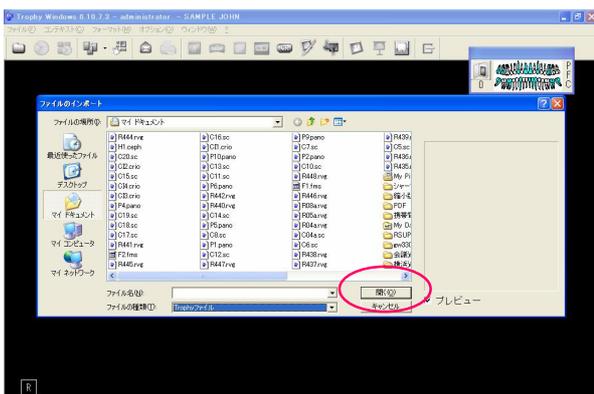

- ⑰ 右下の「開く(O)」を左クリックします。

患者を間違えて画像保存した(移動したい)

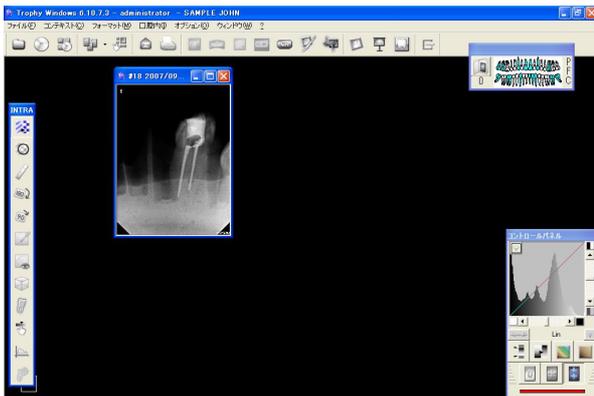

- ⑱ 画像が表示されましたら、通常通りの保存を行ってください。

画像ファイルはそれぞれの画像取得モードによって、ファイル名の頭にアルファベットがつけられています。

●Trophy Windows 6.03~の場合

- Rファイル ... RVGセンサーによって撮影されたデンタル (R1.rvg)
- Pファイル ... デジパンによって撮影されたパノラマ (P1.pano)
- Hファイル ... トロフィーパンCによって撮影されたセファロ (H1.ceph)
- Sファイル ... ピクトボードより入力された口腔内画像 (S1.stv)
- Fファイル ... 全額法で保存された写真 (F1.fms)
- Cファイル ... その他の取込み画像 (C1.sc)
- C1ファイル... ピスタスキャンでの取込み画像 (C11.crio) ... Ver.6.5以降
- Filedata.txt ... 患者登録データ (Filedata.txt)




次に間違えて保存した患者の画像を削除をします。



患者を間違えて画像保存した(移動したい)

(2) 元画像の削除


① 「間違えた患者さん」を「検索」で呼びだして、撮影画面に切り替えます。

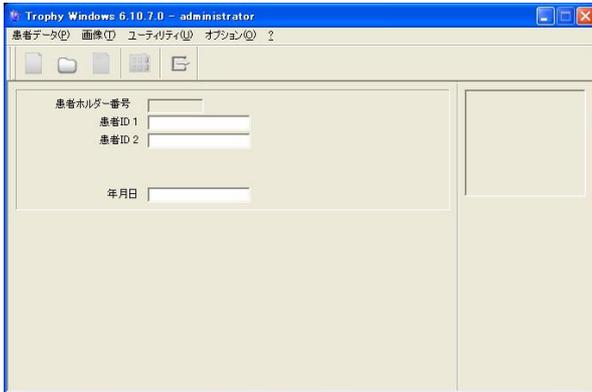

② 左上にある「ファイル(F)」を左クリックし、「削除(D)」を左クリックします。

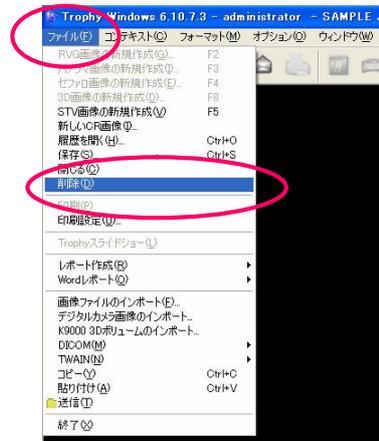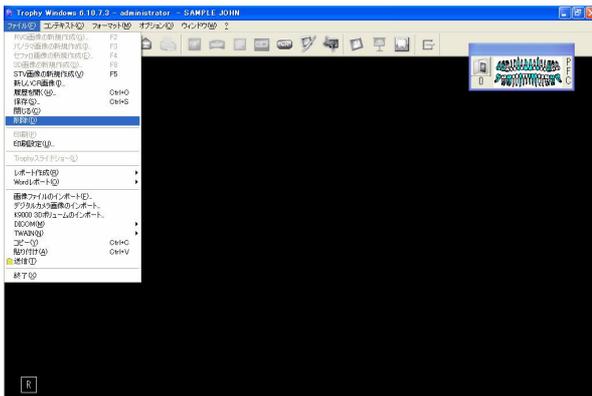

③ 画像一覧が表示されたら、削除したい画像を左クリックします。

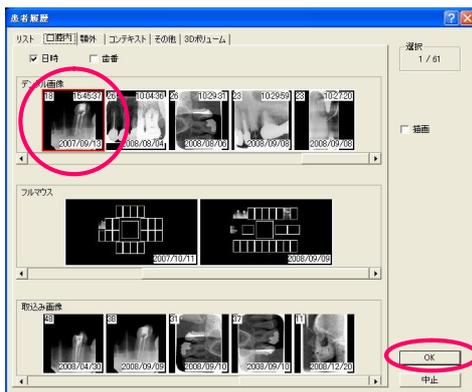

※選択した画像は、赤枠で囲まれます。

④ 右下の「OK」を左クリックします。

⑤ 削除の確認画面が出てきたら、画像を確認して、「削除」を左クリックします。



複数枚選択した場合には、選択した数だけ確認画面が出てきます。