



# 歯列（歯番）パネルに保存できない

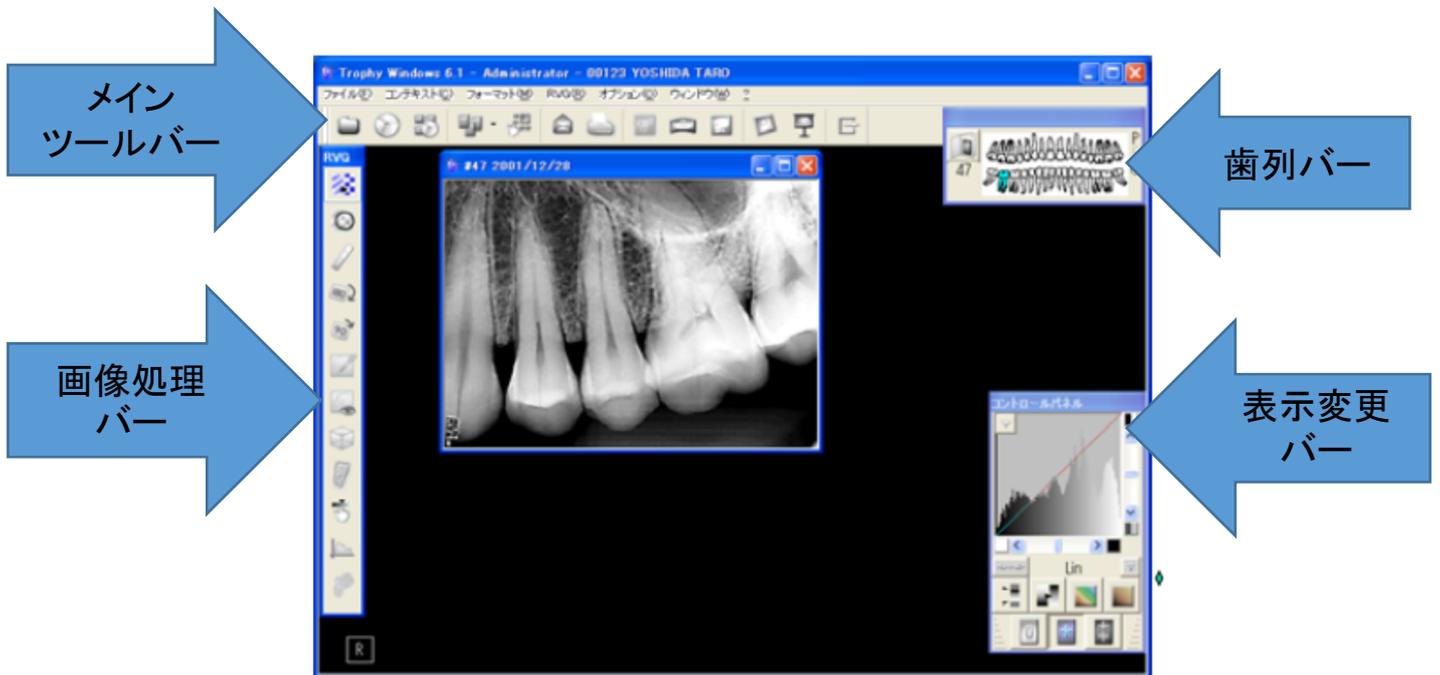


※上記のメインツールバー・画像処理バー・歯列バー・表示変更バーが表示されている事を確認して下さい。

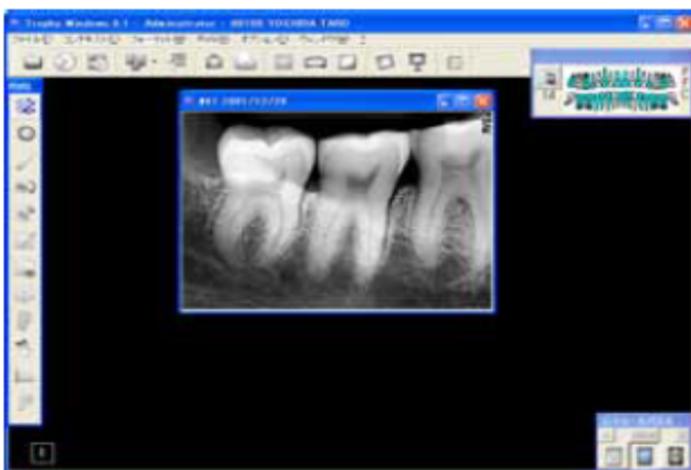

特定の画像ファイルを保存します。

- ①保存したい画像を左クリックします。  
(選択すると上の欄が青くなります。)

# 歯列（歯番）パネルに保存できない

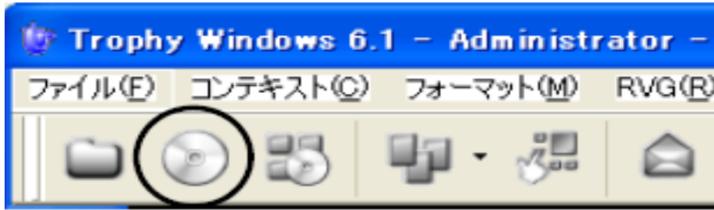

②「保存」アイコンを左クリックします。



③歯列番号やコメントを入力したら、「OK」を左クリックします。

以上で、保存が終了です。

## 画像保存ウィンドウの機能



①「歯」

デンタルレントゲンや、口腔内画像で歯番を4歯まで入力します。  
歯番は、下記を参照して下さい。

②「コメント」

画像に必要なコメントを入力します。  
漢字・かな・英数等通常使用している文字が入力できます。

③「同じファイル、新規ファイル」

通常、保存する場合は、「新規ファイル」で保存されます。  
「同じファイル」は、上書き保存の場合です。