



子機のパソコンから画像を印刷できるようにしたい。


子機からの印刷は、プリンターが共有されている事が前提となります。
プリンターの共有方法は以下の手順で行えます。

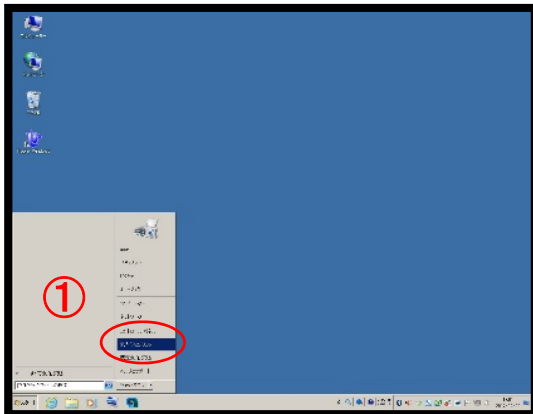

- ① デスクトップ上の「スタート」をクリックします。
次に「デバイスとプリンター」をクリックします。

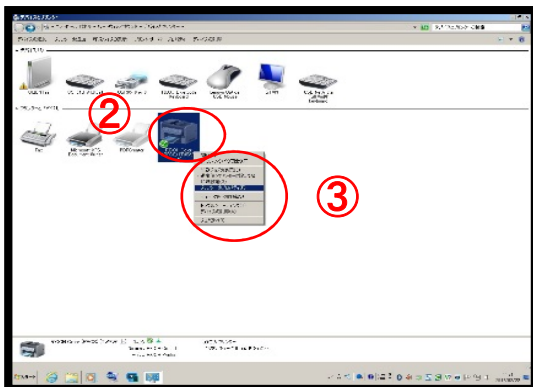

- ② 接続しているプリンターの名称にマウスを持って行きます。
- ③ マウスの右側をクリックしてプリンターのプロパティを左クリックします。

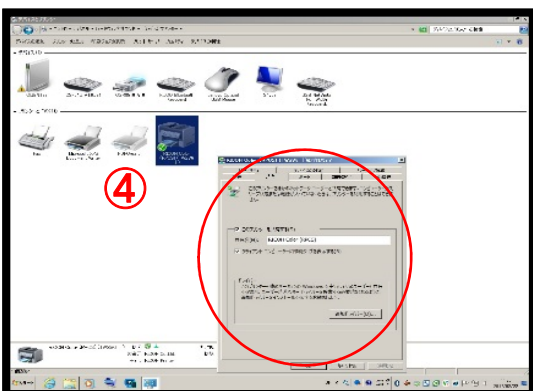


- ④ 「共有」をクリックして
「このプリンターを共有する」にチェックを入れて下にあります「OK」をクリックします。


以上で「共有」設定は終了です。

次は子機のTrophyWindowsでプリンタ設定を行います。

子機のパソコンから画像を印刷できるようにしたい。

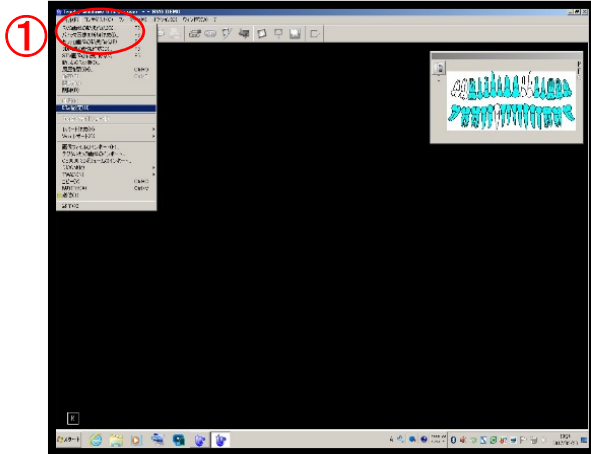

- ① 画面左上のファイルをクリックします
「印刷設定(U)」を左クリックします。

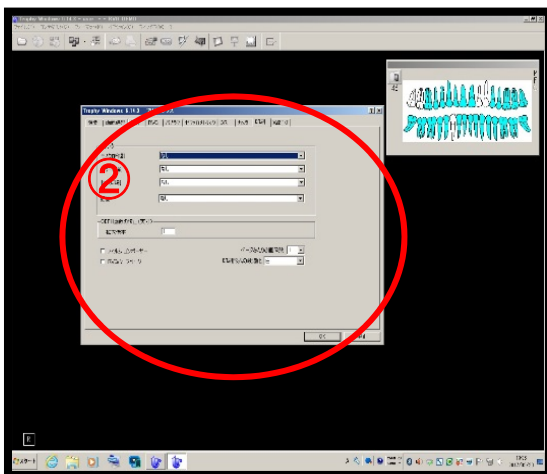

- ② 左の画面の「印刷」の項目にある
「モノクロ」「カラー印刷」、「拡大印刷」に
表示されている「NONE」を、
使用予定のプリンタの機種名に変更します。