

STLファイル変換手順

① 患者様データを呼び出し

② モデルのタブを選択し、変換したデータをクリック

③ 変換をクリックしてSTLファイルに変換

The screenshot shows the Trophy Imaging 7.0.1 software interface. The main window displays a 3D model of a patient's teeth. A smaller window titled '患者履歴' (Patient History) is open, showing a table of patient data. The 'モデル' (Model) tab is selected in this window. A red arrow points to the '変換' (Convert) button in the bottom right corner of the '患者履歴' window.

モデル	日時	時間	スキャンタ...	解剖	コメント
3DIO_08	2016/10/03	15:14:00	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_07	2016/09/15	10:17:04	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_06	2016/09/14	06:32:21	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_05	2016/09/06	13:16:04	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_04	2016/09/06	13:07:11	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_03	2016/09/06	12:58:08	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_02	2016/05/31	22:26:18	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_01	2016/05/31	15:57:22	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_00	2016/05/31	15:54:35	患者	Maxilla	コメントなし
3DIO_65	2016/05/13	13:42:48	患者	Maxilla	No Comr
3DIO_64	2016/05/13	11:44:57	患者	Maxilla	No Comr
3DIO_63	2016/05/13	09:56:00	患者	Maxilla	No Comr

