


## 無影灯の電球交換

### 警告

- 電球交換時は、ご使用のユニットの取扱説明書をお読みの上、必ず電源スイッチをOFF（表示：○）にしてください。事故やケガの原因となります。
- 電球の点灯中や消灯直後は、電球および周辺部が熱くなっています。十分に温度が下がってから交換してください。やけどの原因となります。
- 電球のガラス部分を素手で触らないでください。交換の際は、清潔なティッシュなどで電球を取り扱ってください。素手で触れた場合は、乾いた布またはアルコールをしみこませた布でガラス面を拭き取ってください。手指などの油脂汚れが付着したまま使用すると、電球が破裂し、人に危害を与えるおそれがあります。また、早期の球切れの原因となります。
- 電球は、使用環境や電球の劣化などにより、破裂・破損するおそれがあります。破裂・破損した場合には無影灯は動かさず、速やかにご購入のディーラまたは最寄りの(株)ヨシダ営業所にご連絡ください。
- 接続端子を確実に接続してください。接点不良による点灯不良の原因となります。
- ヨシダ純正品以外の電球を使用しないでください。機器の破損や故障の原因となります。
- 点灯中の電球を間近で長時間直視しないでください。目の痛みや、視覚障害の原因となります。
- 電球はガラス内部の圧力が高いため、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損や飛散の原因となります。
- 使用済みの電球は割らずに廃棄してください。電球を割るとガラスの破片が飛散し、ケガの原因となります。

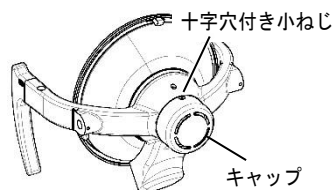

1 電源スイッチをOFF（表示：○）にします。


**補足：** 詳細については、ご使用のユニットの取扱説明書をご覧ください。

2 十字穴付き小ねじを緩め、キャップを取り外します。


3 接続端子を持って取り外します。

### 注意


- 接続端子は必ず端子を持ってはずしてください。電線を持って引き抜くと、点灯不良の原因となります。

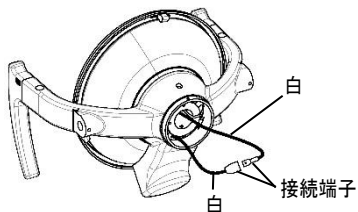


4 バルブ押さえバネを取り外します。バルブ押さえバネがかかっている部分を、イラストのように上方向に引き抜いて取り外します。

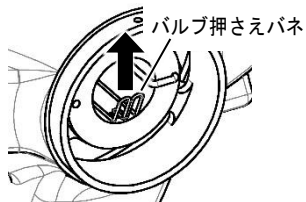


5 白色の電線を引き抜いて電球を取り外します。

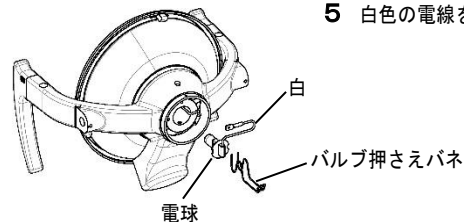


6 清潔なティッシュなどで新しい電球を持ち、A側にBを合わせて（切り欠き形状が丸）差し込みます。

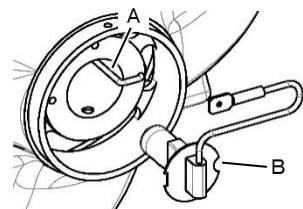


7 バルブ押さえバネを取り付けます。バルブ押さえバネを押し、しっかりと差し込みます。

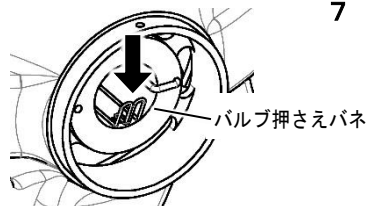

8 接続端子をしっかりと差し込み、接続端子にカバーをかぶせて接続します。

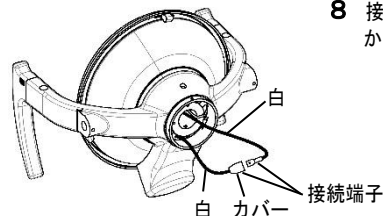

9 キャップを取り付け、十字穴付き小ねじを締めます。

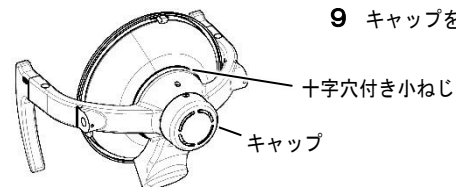

販売業者  
株式会社ヨシダ  
住所：〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
お問い合わせ先  
TEL：03-3845-2941（機械部）  
FAX：03-3845-2948（機械部）

製造販売業者  
吉田精工株式会社  
住所：〒311-3506 茨城県行方市八木蒔660  
お問い合わせ先  
TEL：0299-57-0111（代）  
FAX：0299-57-0711