



### 3.4.5 自動鉢洗い（オートボウルフラッシュ）の設定方法

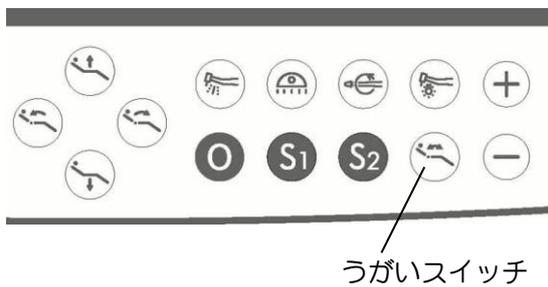

(1) コップを取り上げた時に連動して鉢洗い  
の水を流すことができます。

- 連動の設定と解除  
メモリ・セットスイッチを押しながら、うがいスイッチを押すと、設定できます。再度、同様の操作で解除します。

**補足**：テーブルパネルが表示器仕様の場合  
連動の設定時に B の表示をします。

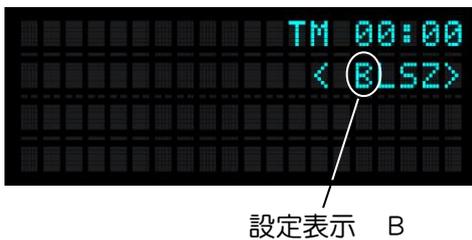

- 時間の設定  
メモリ・セットスイッチを押しながら鉢洗いスイッチを押し続けると、1秒毎にブザーが鳴ります。希望する時間だけ押し続けてください。その設定された時間、鉢洗いの水が流れます。

