


デンタルを撮影したが画像が出ない

①D'Toolboxをダブルクリックして下さい

②ドライバー設定タブから、画像挿入機能リカバリーを選択し、「はい」を押して下さい

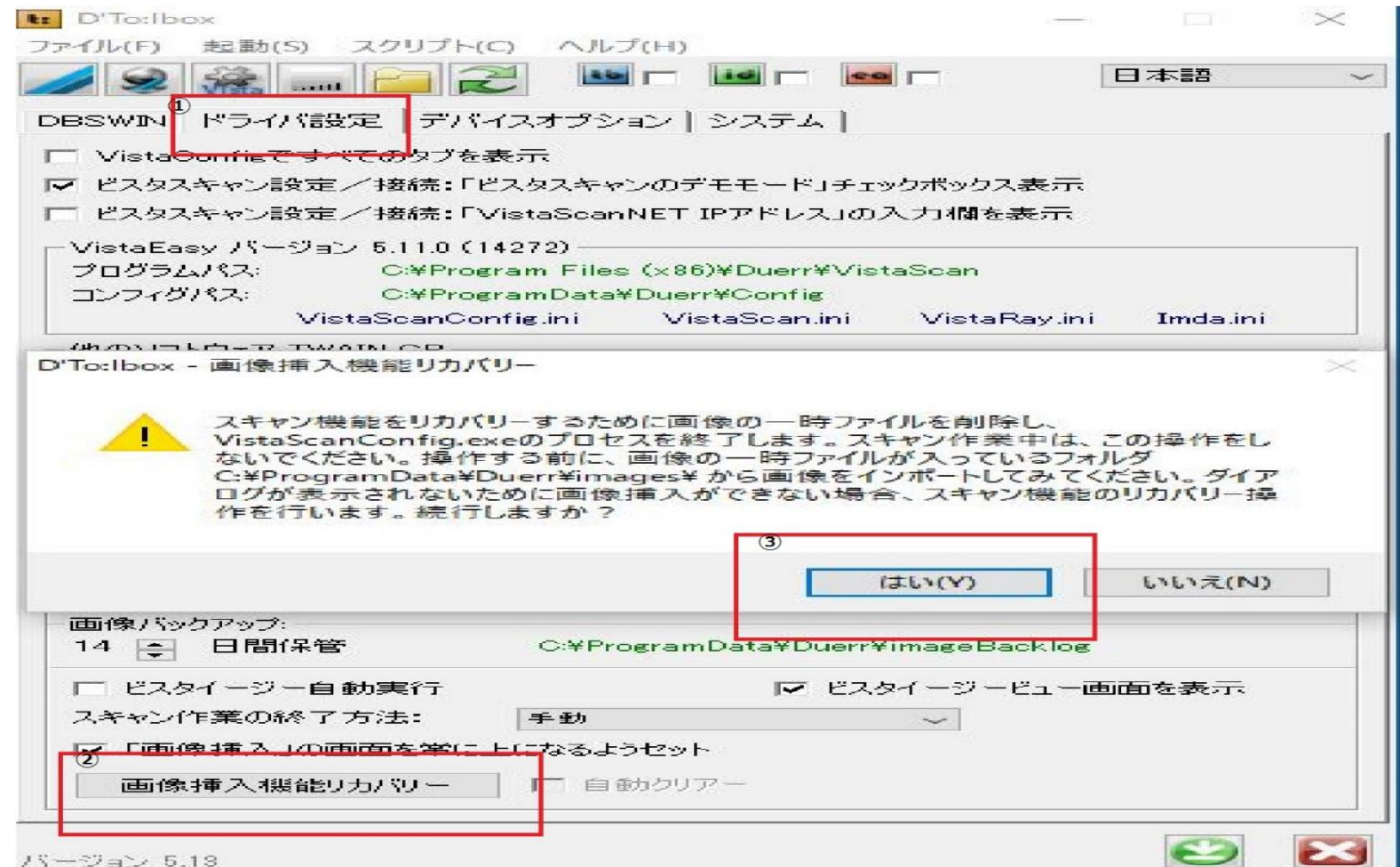


デンタルを撮影したが画像が出てこなかった

①スキャン画面の下段にある、
歯車ボタン(ツールボックス)を選択

②ツールボックスの右端の、
画像修復実行を選択

③画像修復画面の左側のリストから、
必要な画像を選択し、
右下の画像修復実施を選択

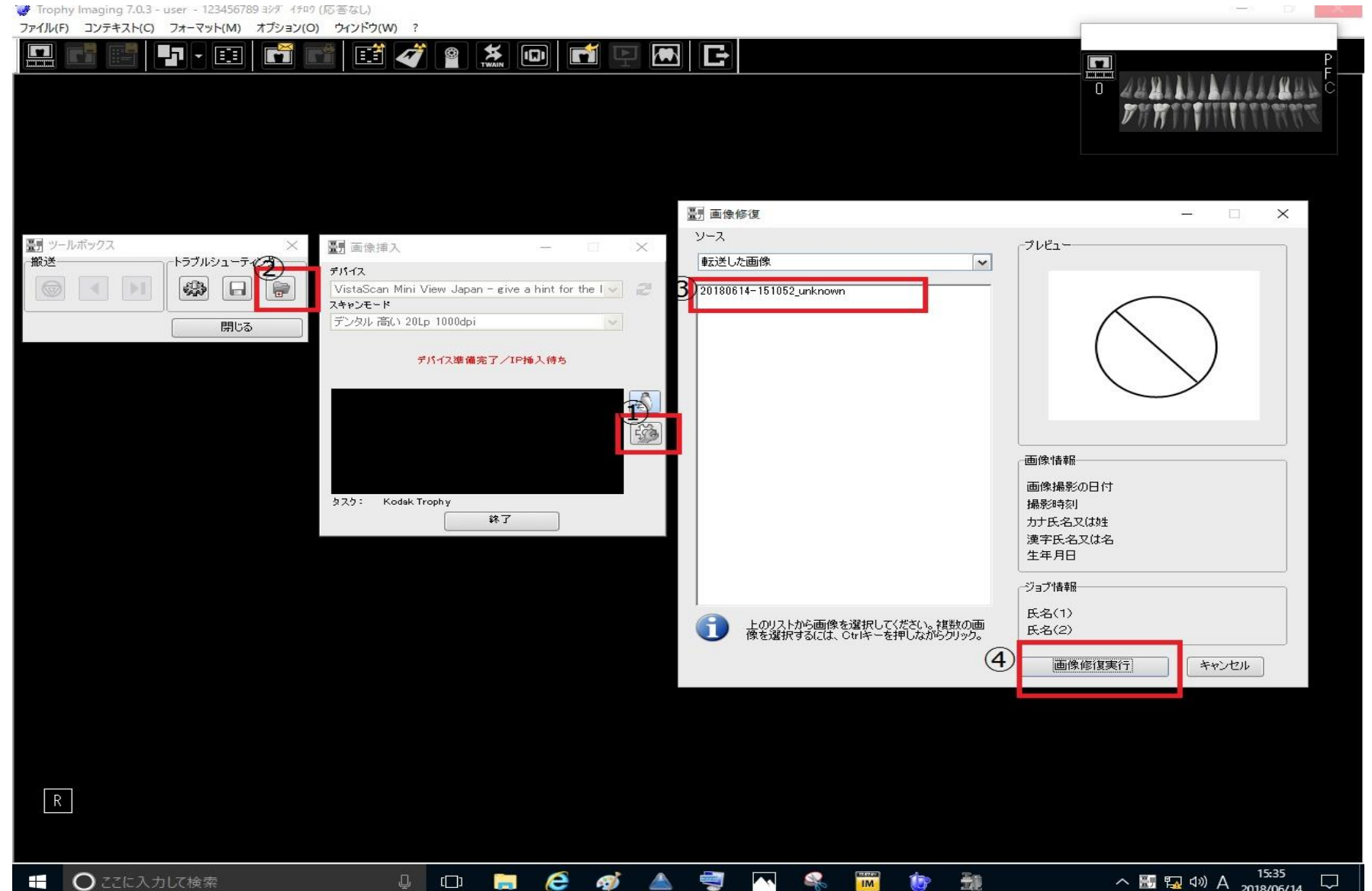

デンタルを撮影したが画像が出てこなかった

①画面が切り替わり、左上の「チェックした画像を転送」を選択

②画像挿入の画面に戻るので、画像挿入の一番下にある「終了」を選択すると画像が出ます

