

Rawデータ削除方法のご説明

①データ編集実行をクリック



②検査データ編集をクリック



③検査年月日をクリックし、古いデータ順に並べ変えます

| 登録検査データ一覧 | | | | | | |
|-----------|-----|------|----|------------|------------|--------------|
| ID番号 | 氏名 | | 性別 | 生年月日 年齢 | 検査年月日 | ステータス 担当名 |
| | 苗字 | 名前 | | | 年月日 | |
| 1411 | ヤマダ | シゲトシ | 男性 | 昭和28年1月11日 | 平成28年1月17日 | 検査-検査 |
| | 山田 | 真司 | | | 01年 | インプラント検査 |

④削除をクリックして、削除実行



※ローデータは1症例あたり、372MBの容量があります。

※ローデータは医療データの為、1度に複数のデータ削除が出来ません。

1症例ずつ作業を行って下さい。

※ローデータを削除しても、ビューアーのデータは消えません。

※ローデータをビューアーへ転送する際、失敗する事も考えられますので、

ローデータの削除はビューアーで開ける事を確認後に行ってください。

※間違っ患者情報編集を削除しない様にご注意下さい。