


「E2499」が表示された場合の原因、対処方法

本体とPCとの通信が途切れている可能性があります。

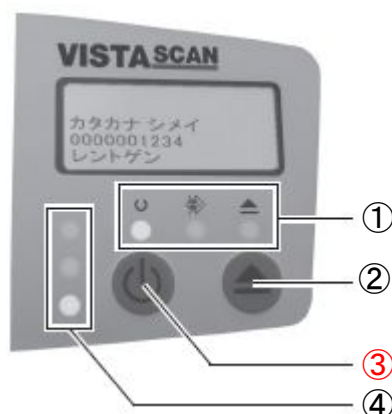

① 機器状態LED

機器の状態を表示します：

- 青LEDが点灯 → パソコンと未通信
- 緑LEDが点灯 → 作動準備完了
- 黄LEDが点灯 → クリーニングモード

② クリーニングボタン

クリーニングボタンを押すと、挿入口のスライダーが後退します(黄LEDが点灯)。もう一度押すとスライダーが元に戻ります。

③ ON/OFFボタン

- ボタンを押すと電源が入ります。
- ボタンを2秒間押し続けると機器がシャットダウンします。完全にシャットダウンするまでの間、緑と青のLEDが交互で点滅します。
- リセットするには、全てのLEDが消えるまでボタンを押し続けてください。


④ 挿入口状態LED

挿入口／IP搬送の状態を表示します。

- 緑LEDが点灯 → IP挿入可能
- 黄LEDが点灯 → IP搬送中、挿入不可
- 赤LEDが点灯 → エラー


③ON/OFFボタンを長押しして電源を切り、もう一度電源を入れ直ししてください。

「E2499」が表示された場合の原因、対処方法

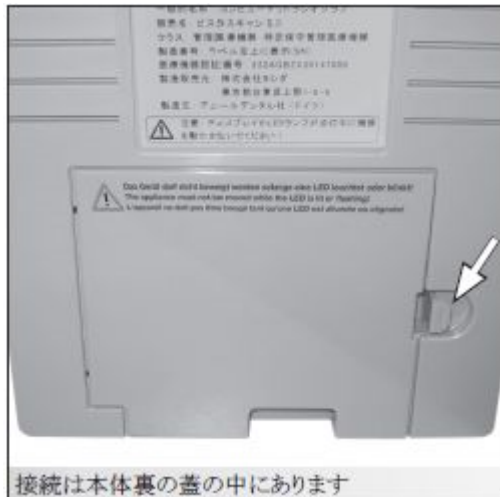

⑤ → ACアダプタ接続(24V)
付属のACアダプタの端子をここに接続します。

⑥ → リセットボタン
ネットワーク設定を初期設定に戻します:リセットボタンを押しながら電源を入れ、そのままリセットボタンを押し続けます。15～20秒後に本体のディスプレイに確認メッセージ「Factory Reset」が表示されます。

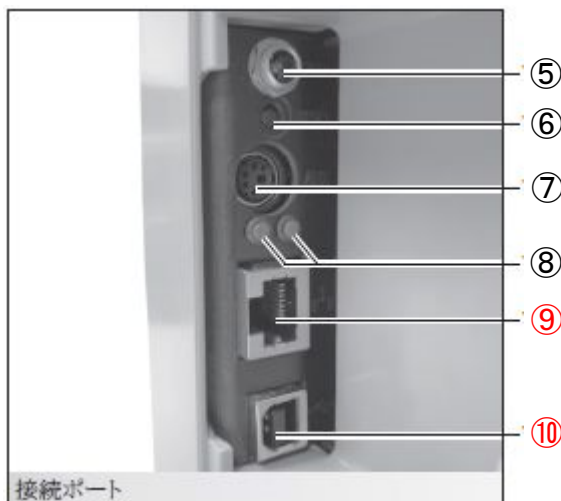

⑦ → AUX接続
技術者用の接続です。ご使用いただけません。

⑧ → イーサネットLAN状態LED
イーサネットLAN接続とデータ送信の状態を表示します。

⑨ → イーサネットLAN接続

⑩ → USB接続

⑨イーサネットLAN接続、または、⑩USB接続のケーブルを抜き差ししてください。

復旧しない場合は最寄りの株ヨシダ営業所までご連絡ください。