



画像を読み込む際に「プログラムの終了」が表示され失敗

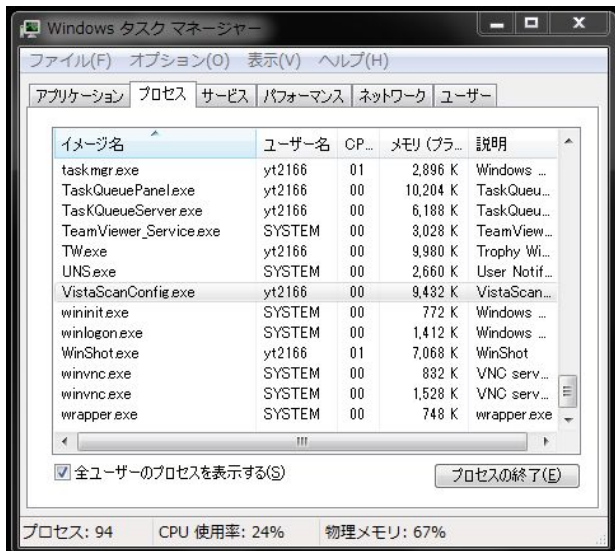

- ①キーボード操作 **Ctrl+Alt+Delete** を押して、Windowsタスクマネージャーを表示させる。
- ②「プロセス」のタブを開く。
- ③「イメージ名」欄内の「VistaScanConfig.exe」をクリックし、帯を入れたら、右下の「プロセスの終了」をクリックする。

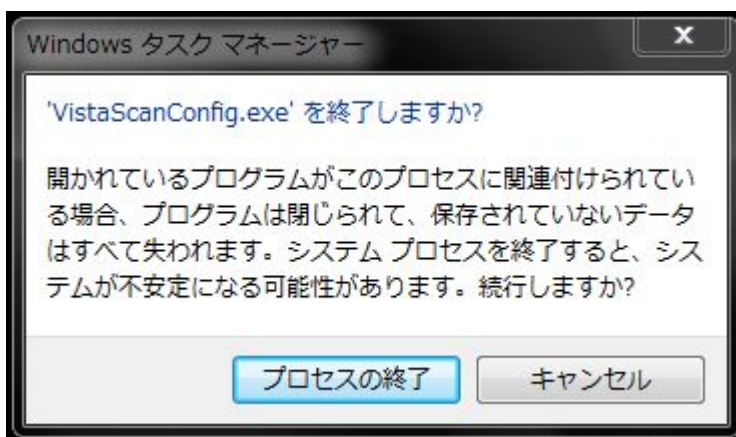

- ④「 VistaScanConfig.exe を終了しますか? 」と聞いてくるので、下部の「プロセスの終了」をクリックすると、スキャンする画面が閉じられます。
- ⑤再度、スキャンする画面の状態に進めてみてください。