


本体の電源が入らない



ビスタスキャンミニの電源が入りません。

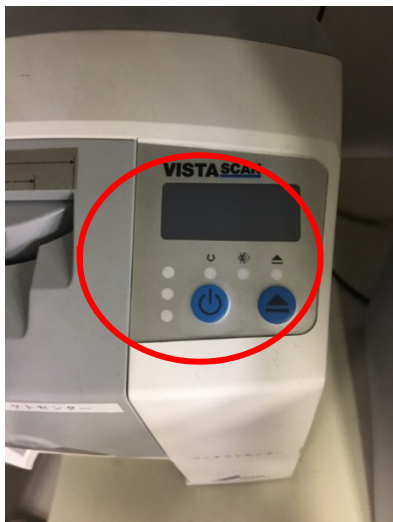

通常時(LED点灯及び液晶が表示)


【原因】

電源ケーブル

電源コンセント

ビスタスキャンミニ本体

- ①ビスタスキャンミニ本体の電源ケーブルの接続を確認します。
また、電源アダプターのLEDのランプが点灯している事を確認します。

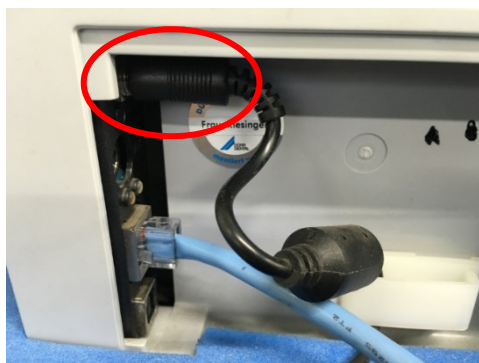

ビスタスキャンの背面の電源ケーブル



電源アダプター(LEDが点灯しているか確認)

- ②電源アダプターのLEDのランプが点灯していない場合は、違うコンセントから電源を取ります。それでも点灯しない場合は、電源アダプターの問題の可能性があります。

上記を試しても改善しない場合は最寄りの㈱ヨシダへご連絡をお願いします。