


コップ給水時間調整ボリュームの場所

■ ユニット部の名称と働き

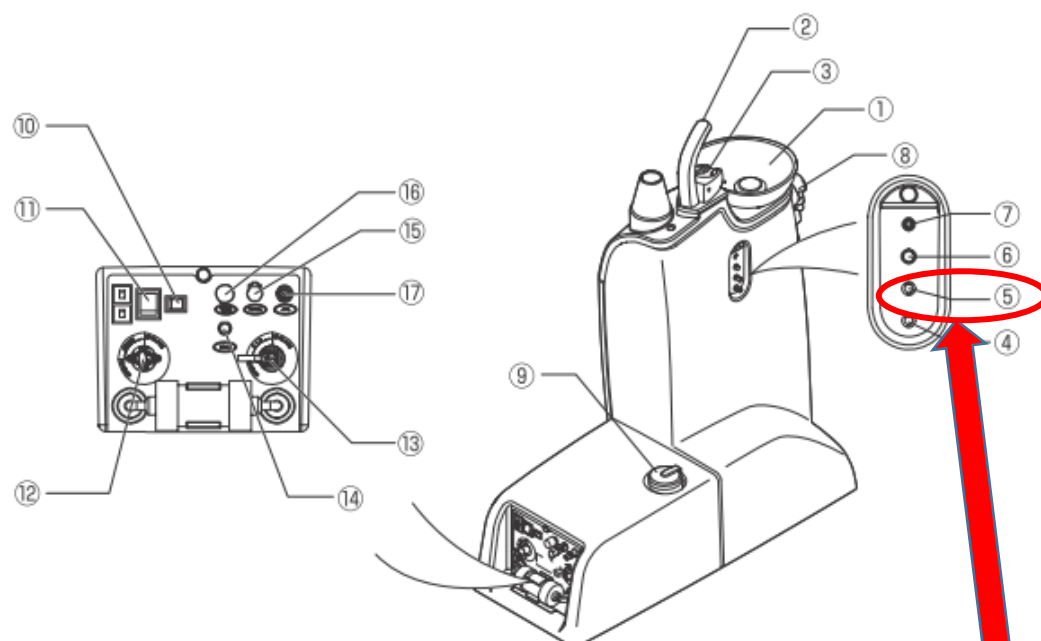

No.	名称	働き
①	鉢	患者がうがいをするときに使用します。
②	給水ノズル	患者のうがい用の水を供給します。
③	オートカラン	紙コップを置くとうがい用の水が供給されます。
④	無影灯調光ボリューム	无影灯の明るさを調整します。
⑤	コップ給水時間調整ボリューム	コップ給水時間を調整します。
⑥	シリンジエアー調整ツマミ	AEH側シリンジのエアー量を調整します。
⑦	シリンジ水量調整ツマミ	AEH側シリンジの水量を調整します。
⑧	バキュームフィルタ	バキュームおよび排唾管で吸引した排水のフィルタです。
⑨	排水トラップ	排水設備の配管の悪臭やガスが、屋内へ侵入するのを防ぎます。
⑩	ウォームスイッチ	ONにすると、うがい用の水およびAEH部のシリンジ(オプション)からの注水が温水になります。
⑪	電源スイッチ	本製品の電源です。
⑫	給水元コック	コックを開くと、水をユニットに供給します。
⑬	空気元コック	コックを開くと、エアーをユニットに供給します。
⑭	ドレンボタン	ボタンを1秒以上押すと、エアーフィルタ(内蔵)の水が抜けます。
⑮	水ワンタッチコック (オプション)	水ワンタッチジョイントからの水量を調整します。
⑯	水ワンタッチジョイント (オプション)	専用のワンタッチジョイントを接続して、水を出すことができます。
⑰	エアーワンタッチジョイント (オプション)	専用のワンタッチジョイントを接続して、エアーを出すことができます。