


各インスツルメント水量調整

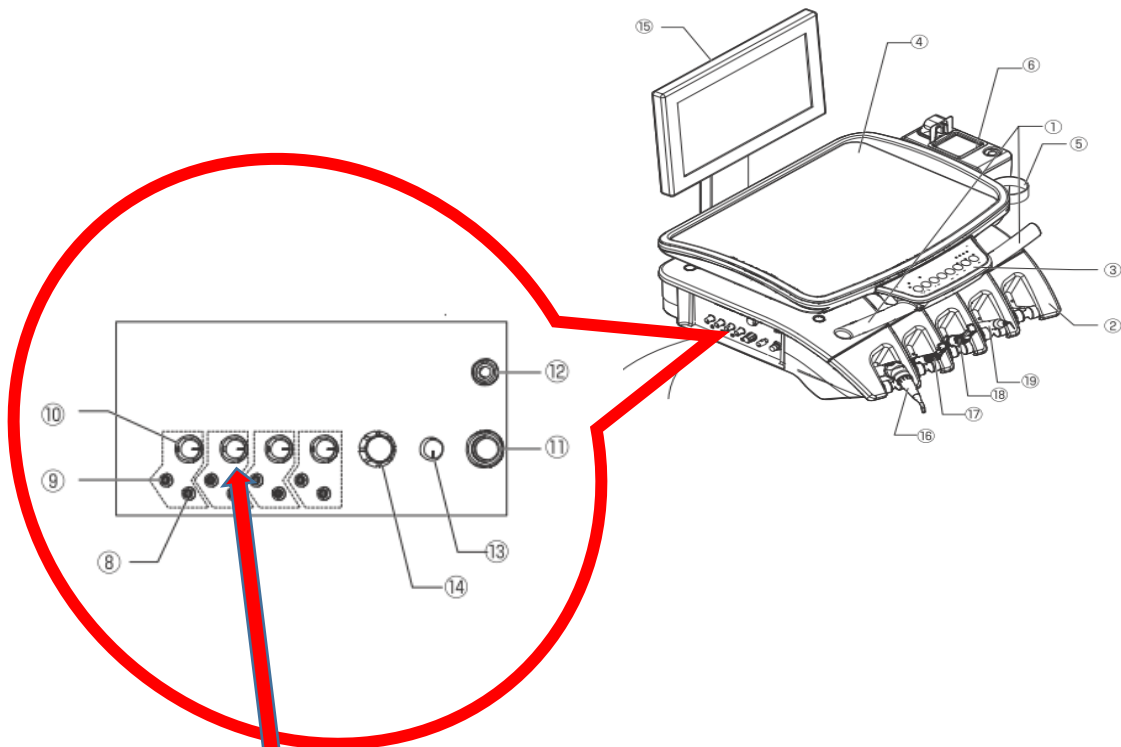

No.	名称	働き
①	取っ手	テーブルを任意の位置に移動するときに使用します。
②	ハンガ	各インスツルメントを収めるハンガです。
③	テーブルパネルスイッチ	チェアおよびインスツルメントなどをコントロールします。
④	テーブルトレイ	施術に必要な器材を置きます。
⑤	汚物入れ掛け	汚物を入れる紙コップを掛けます。
⑥	オートガスバーナ (オプション)	ロウや仮封材などを過熱し、軟化させることができます。
⑦	No-Back 排気フィルタ	エアタービンハンドピース使用中に、排気エアからのオイルを貯めるフィルタです。
⑧	チップ・スプレエアー調整ツマミ	各インスツルメントのチップ・スプレエアーを調整します。
⑨	ドライブエア調整ツマミ	各インスツルメントのドライブエア量を調整します。
⑩	水量調整ツマミ	各インスツルメントの水量を調整します。
⑪	シリンジエアー調整	テーブル側シリンジのエアー量を調整します。
⑫	シリンジ水量調整ツマミ	シリンジの水量を調整します。
⑬	マイクロモータ回転速度調整ボリューム	マイクロモータの最高回転速度を調整します。
⑭	スケーラパワー調整ボリューム (超音波スケーラ搭載時 (オプション))	超音波スケーラのパワーを調整します。
⑮	フィルムビュー・パノラマ (オプション)	X線フィルムを観察します。
インスツルメント		
⑯	シリンジ*	口腔内を洗浄および乾燥します。
⑰	エアタービンハンドピース*	歯を切削するときに使用します。
⑱	マイクロモータ*	歯および金属を切削するときに使用します。
⑲	超音波スケーラ* (オプション)	歯の表面から歯石などの沈着物を除去するときに使用します。
⑳	タブレットアーム (オプション)	タブレットを取り付けます。
㉑	タブレット (オプション)	チェアおよびインスツルメントなどをコントロールします。 ※詳細は「アプリマニュアル」をご覧ください