


# マイクロモーター回転速度調整ボリューム

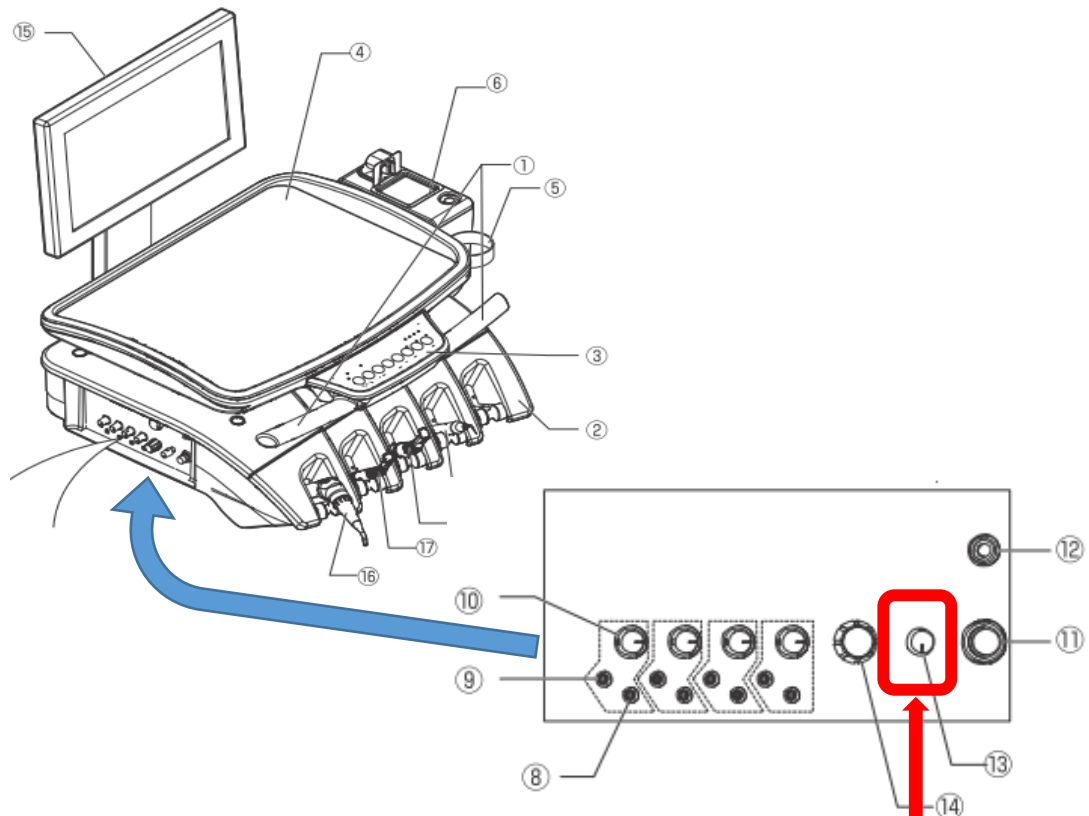

| No. | 名称  | 働き                                     |
|-----|---|--|
| ①   | 取っ手                                       | テーブルを任意の位置に移動するときに使用します。               |
| ②   | ハンガ                                       | 各インスツルメントを収めるハンガです。                    |
| ③   | テーブルパネルスイッチ                               | チェアおよびインスツルメントなどをコントロールします。            |
| ④   | テーブルトレイ                                   | 施術に必要な器材を置きます。                         |
| ⑤   | 汚物入れ掛け                                    | 汚物を入れる紙コップを掛けます。                       |
| ⑥   | オートガスバーナ (オプション)                          | ロウや仮封材などを過熱し、軟化させることができます。             |
| ⑦   | No-Back 排気フィルタ                            | エアタービンハンドピース使用中に、排気エアからのオイルを貯めるフィルタです。 |
| ⑧   | チップ・スプレエア調整ツマミ                            | 各インスツルメントのチップ・スプレエアを調整します。             |
| ⑨   | ドライブエア調整ツマミ                               | 各インスツルメントのドライブエア量を調整します。               |
| ⑩   | 水量調整ツマミ                                   | 各インスツルメントの水量を調整します。                    |
| ⑪   | シリンジエア調整                                  | テーブル側シリンジのエア量を調整します。                   |
| ⑫   | シリンジ水量調整ツマミ                               | シリンジの水量を調整します。                         |
| ⑬   | マイクロモーター回転速度調整ボリューム                       | マイクロモータの最高回転速度を調整します。                  |
| ⑭   | スケーラパワー調整ボリューム<br>(超音波スケーラ搭載時<br>(オプション)) | 超音波スケーラのパワーを調整します。                     |
| ⑮   | フィルムビュー・パノラマ<br>(オプション)                   | X線フィルムを観察します。                          |