


## アームが回転しない



①この部分が回らない。

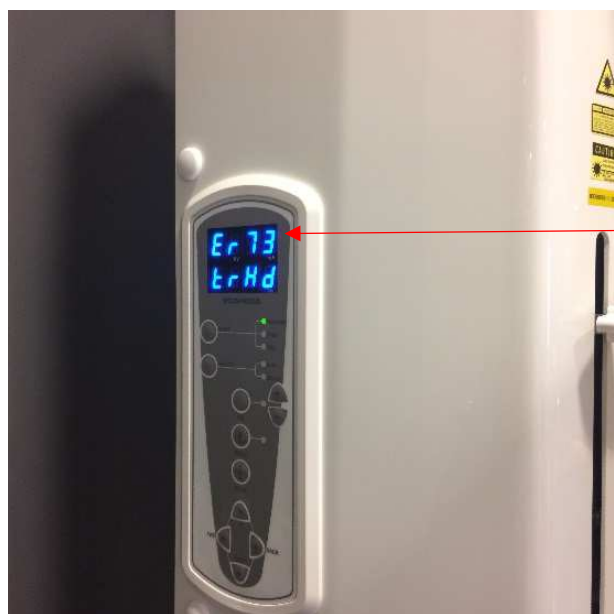

②本体の左側のコントロールパネルにエラー表示が出ていませんか？エラーは左図のようにEr 数字の表示が出てきます。この番号をお控え下さい。

③Er番号が09,10,54,56,60,67,68,69は回転系のエラーです。コントロールパネルのリセットスイッチを押し解除して下さい。復旧しない場合は下記コンタクトセンターにご連絡をお願い致します。

復旧しない場合は、  
(株)ヨシダ コンタクトセンター（0120-178-148）までご連絡ください