


## 「FL01」が表示された際の原因と対処方法

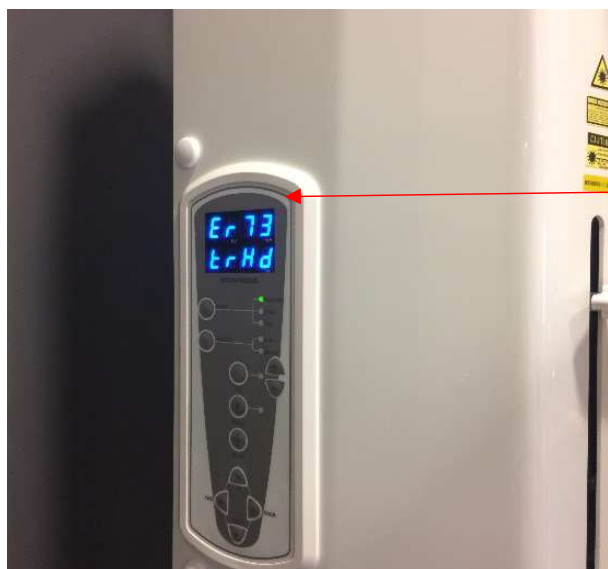

①この部分にFL01が表示されます。


X線の照射回数が2000回を数えました。と  
の内容表示です。  
撮影は可能です。



②PANOURA19 ControlManager アイコ  
ンをクリックしてください。

※アイコンはデスクトップ画面又は画面右下  
タスクトレイ（日付・時刻表示の左側）にあ  
ります。

# 「FL01」が表示された際の原因と対処方法

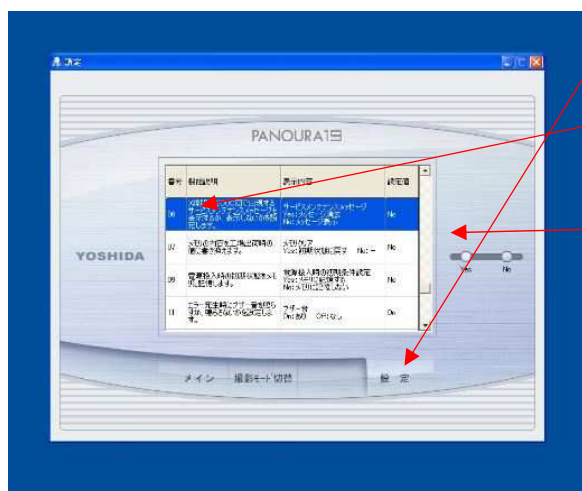

①設定の文字の上をクリックします。

②番号06を選択します。

③YESを選択します。



④メインに画面を戻して画面を右上×で終了させます。

復旧しない場合は、  
(株)ヨシダ コンタクトセンター (0120-178-148) までご連絡ください