


画像を撮影したが保存し忘れたので画像を修復したい

①スキャン画面の下段にある、
歯車ボタン(ツールボックス)を選択

②ツールボックスの右端の、
画像修復実行を選択

③画像修復画面の左側のリストから、
必要な画像を選択し、
右下の画像修復実施を選択

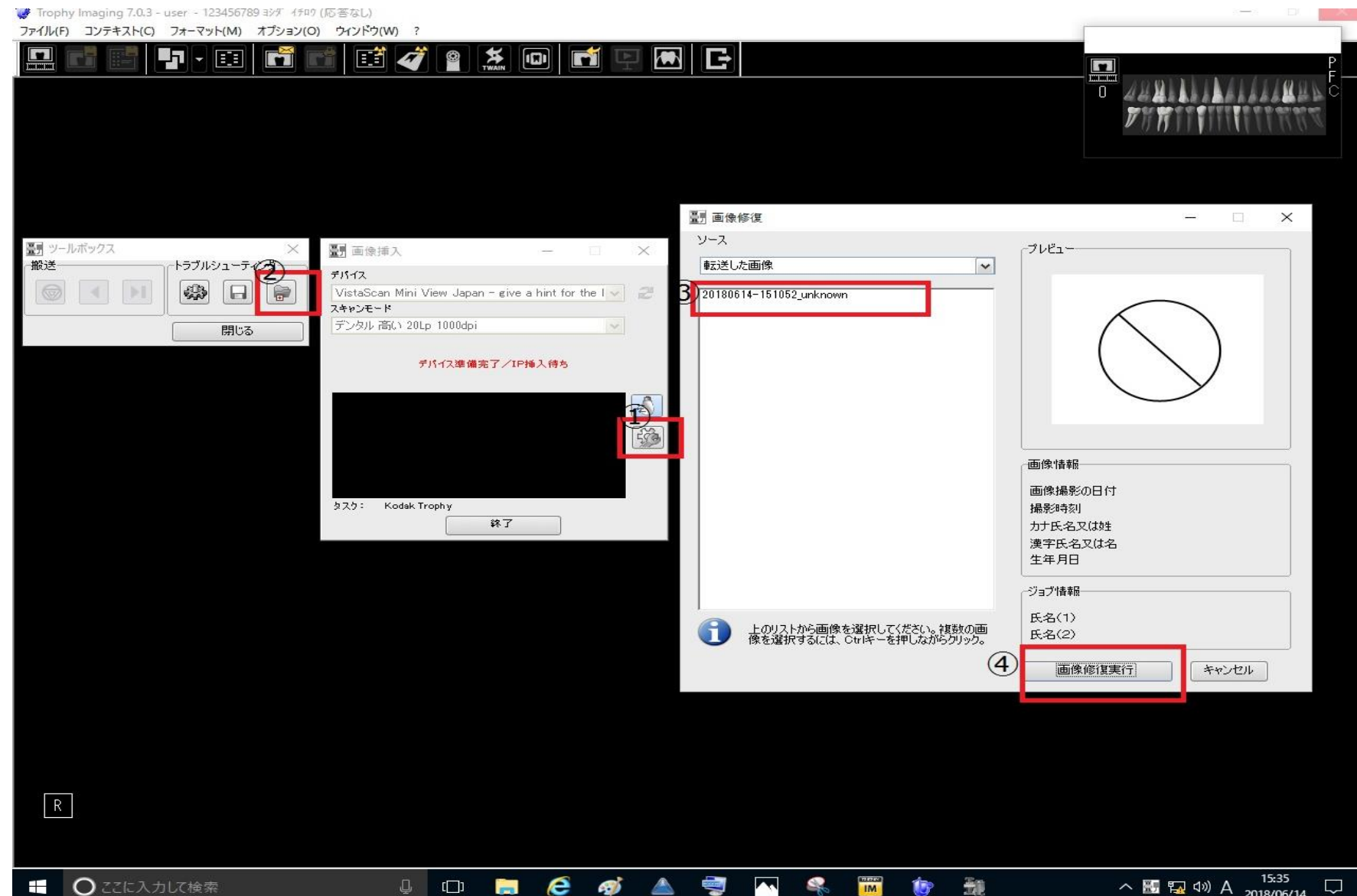

画像を撮影したが保存し忘れたので画像を修復したい

①画面が切り替わり、左上の「チェックした
画像を転送」を選択

②画像挿入の画面に戻るので、画像挿入
の一番下にある「終了」を選択すると画像が
出ます

