


画像の削除方法

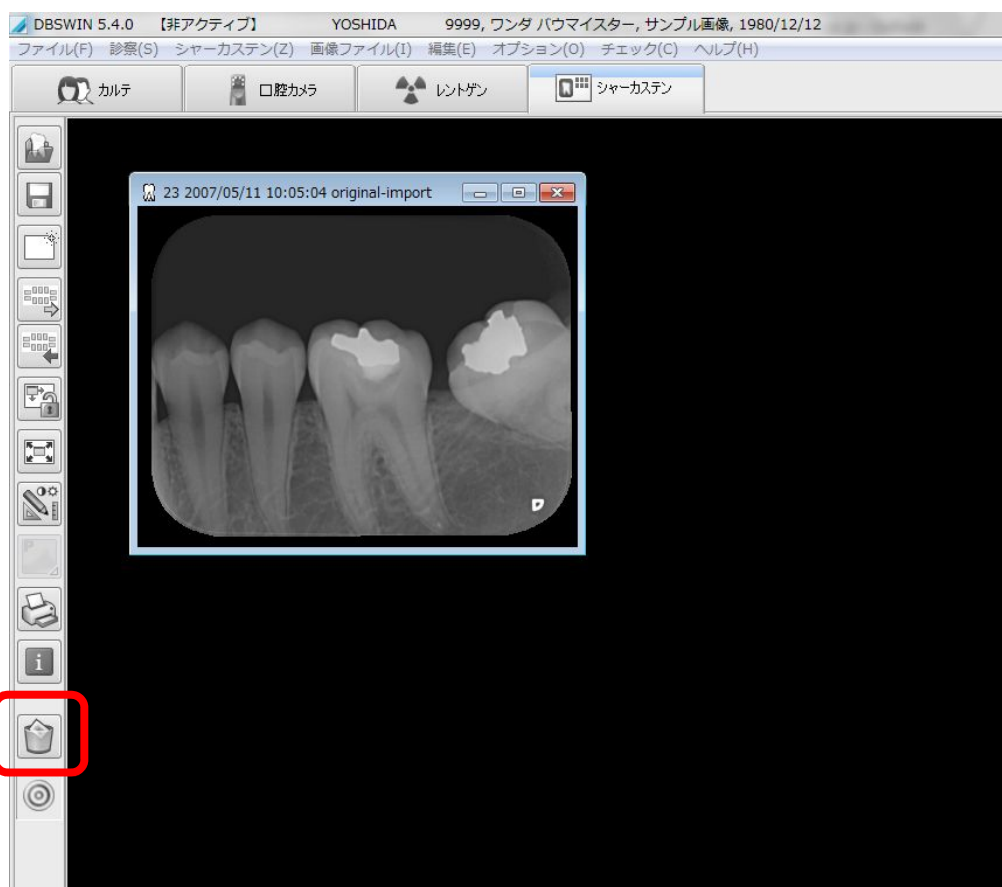

選択した画像を削除します。画像を削除しようとする時、隠しファイルにすることを提案するダイアログが表示されます。このダイアログで「いいえ」をクリックすると画像は完全に削除されてしまいますのでご注意ください。レントゲン画像は法律により保存期間が定められていますので、削除には制限があります。

一度隠しファイルにした画像を再度表示する場合は、メニューの「オプション」で「設定タブを表示」→「モジュール」→「シャークステン」→「各種設定」→「隠しファイルの画像を再表示」の手順で行ってください。