

## 画像に不要な線が入る

まず、縦線か横線か確認をします。




### 【縦線の場合】

レーザースリット部の汚れ

(例えば髪の毛やホコリ)が原因が考えられます。  
その際はレーザースリットの清掃が必要になります。

※ (株)ヨシダ コンタクトセンターへご連絡ください。  
TEL:0120-178-148

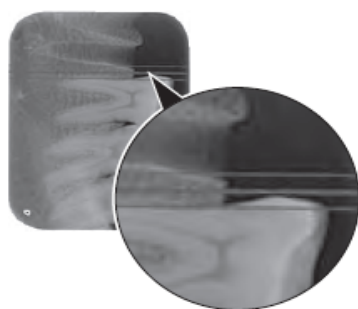


### 【横線の場合】

横方向に灰色の線が左右張っている場合は、搬送時のずれが考えられます。

再度搬送を実施していただき改善されない場合は  
搬送バンドの交換等が必要になります。

※ (株)ヨシダ コンタクトセンターへご連絡ください。  
TEL:0120-178-148

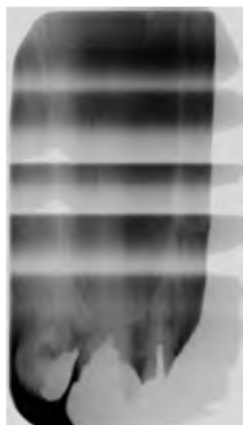

### 【明るい水平の縞模様がある場合】

不正なIP保護カバーまたは不正なIPが  
使用されていませんか？

純正のIP保護カバー、IPを使用していただき  
症状が改善されるか確認をお願い致します。