


# 「E1171」が表示された場合の原因、対処方法

本体内部の読み取り部分が正常に機能していません。  
レーザーダイオード故障の可能性があります。

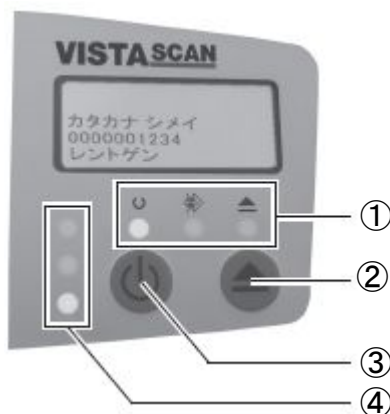

## ① 機器状態LED

機器の状態を表示します：

- 青LEDが点灯 → パソコンと未通信
- 緑LEDが点灯 → 作動準備完了
- 黄LEDが点灯 → クリーニングモード

## ② クリーニングボタン

クリーニングボタンを押すと、挿入口のスライダーが後退します(黄LEDが点灯)。もう一度押すとスライダーが元に戻ります。

## ③ ON/OFFボタン

- ボタンを押すと電源が入ります。
- ボタンを2秒間押し続けると機器がシャットダウンします。完全にシャットダウンするまでの間、緑と青のLEDが交互で点滅します。
- リセットするには、全てのLEDが消えるまでボタンを押し続けてください。

## ④ 挿入口状態LED

挿入口／IP搬送の状態を表示します。

- 緑LEDが点灯 → IP挿入可能
- 黄LEDが点灯 → IP搬送中、挿入不可
- 赤LEDが点灯 → エラー

③ON/OFFボタンを長押しして電源を切り、もう一度電源を入れ直ししてください。

復旧しない場合は修理が必要です。最寄りの㈱ヨシダまでご連絡ください。