


「E1118」が表示された場合の原因、対処方法

デバイス本体カバーが外れている。
(挿入口のカバー／ロックプレートが外れている)

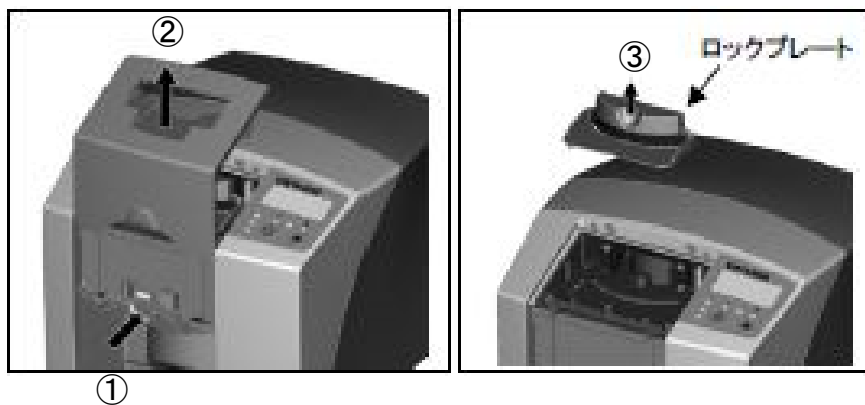


本体内部にイメージングプレート(以下、IP)が入っていないことを確認してください。
挿入口に保護カバーが残っていないことを確認してください。
挿入口が閉じられていることを確認してください。
本体の電源をOFFの状態にしてください。

①ロックボタンを押しながら、②挿入口カバーを持ち上げカバーを外します。

③ロックプレートの両脇を挟みながら持ち上げて外します。

「E1118」が表示された場合の原因、対処方法

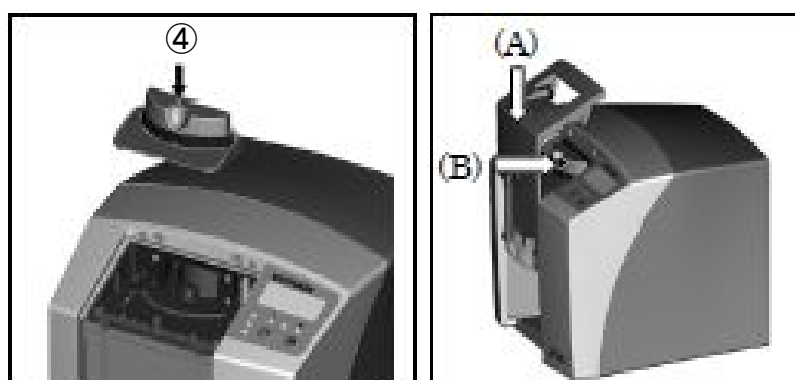

④ロックプレートを両脇の溝に引っ掛けるようにして差し込みます。

(A) 挿入口カバーを取り付ける際に、(B) ロックプレートを矢印の方向に押しながら (A) 挿入口カバーを下方に移動し装着します。

電源再投入し、自動に挿入口が開け閉めする動きを確認してください。