
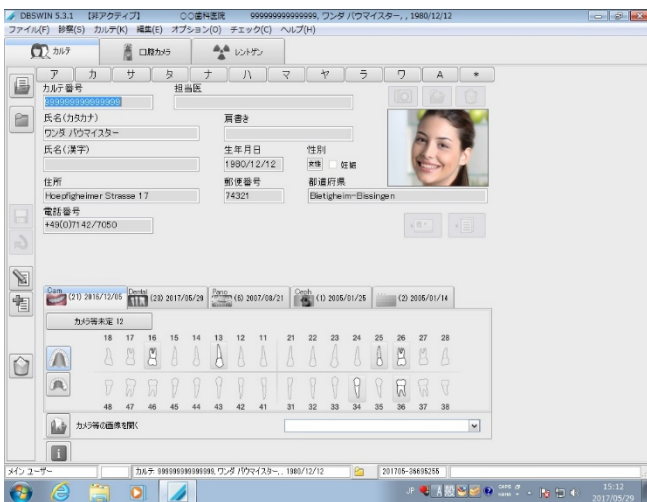


# シャーカステンに画像が表示されない


シャーカステンタブをクリックしても表示されないか確認し改善されない場合はPC再起動後、別の患者様も同じ障害が発生するか確認致します。

※シャーカステンタブ自体が表示されていない場合


オプション→設定タブを表示をクリック致します。

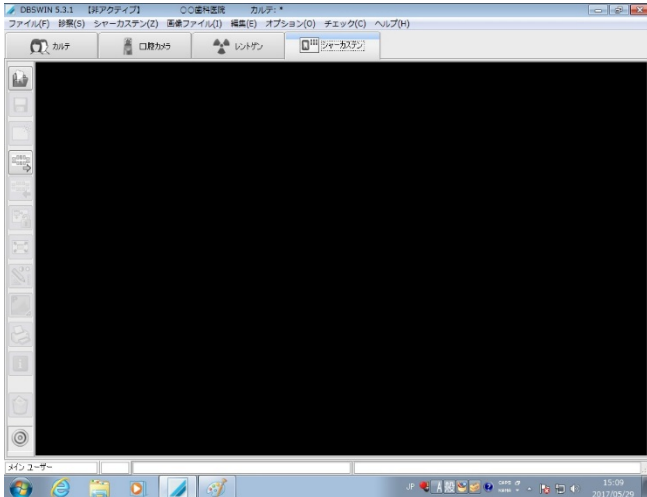


# シャーカステンに画像が表示されない

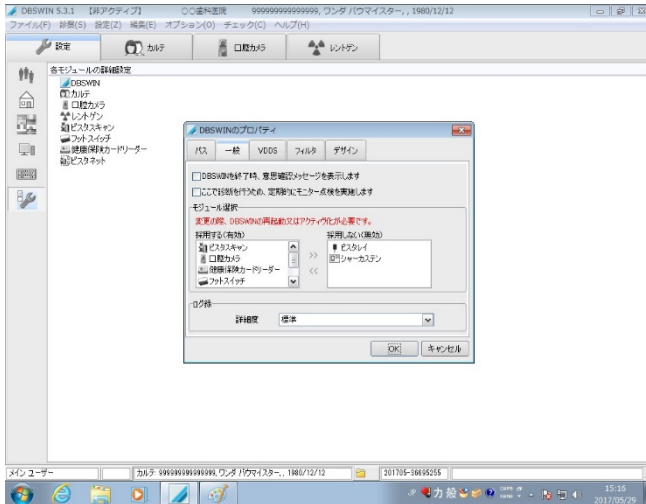

モジュール→DBSWIN→一般→  
採用しない(無効)項目にシャーカ  
ステンがあるか確認致します。

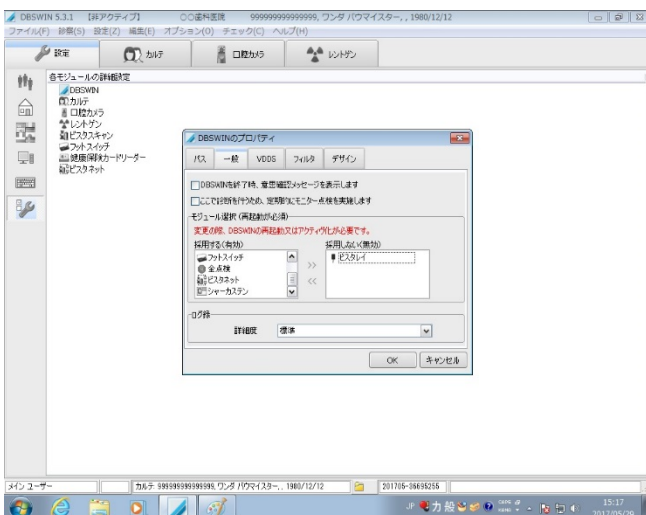

選択したモジュールを選択して採  
用する(有効)にします。

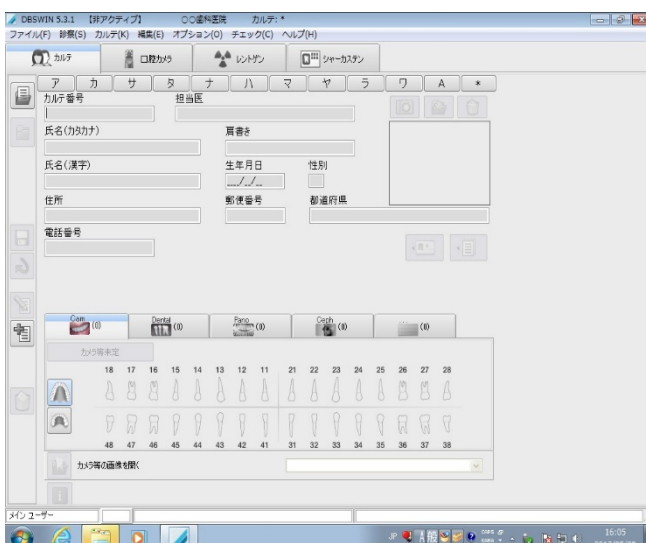

シャーカステンタブが表示された  
がクリックしてもシャーカステンが  
表示されない場合は弊社コンタク  
トセンター0120-178-148迄連絡を  
お願い致します。