



# エクスクルーシブのアクティベート手順(※トロフィーをインストールしていない場合)

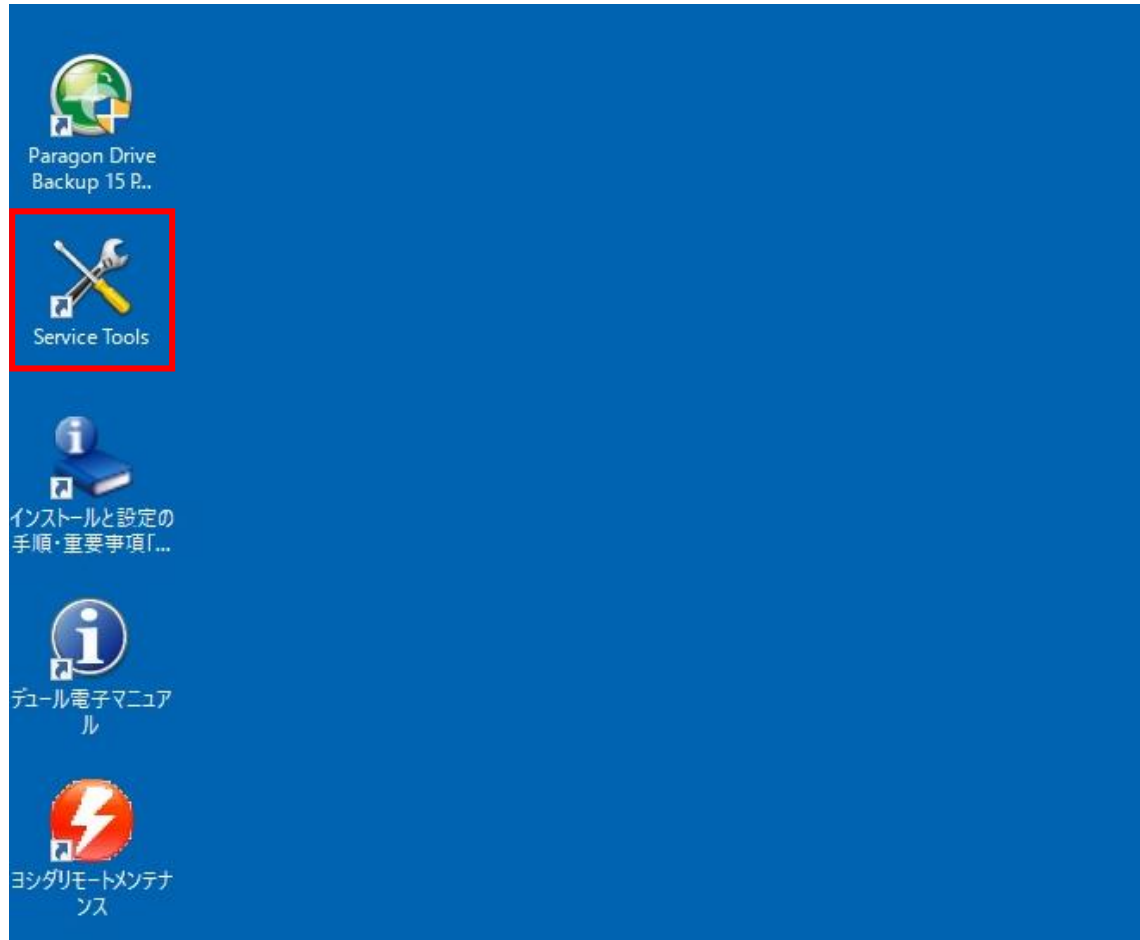


①デスクトップ上のService Toolsのアイコンをダブルクリックします。

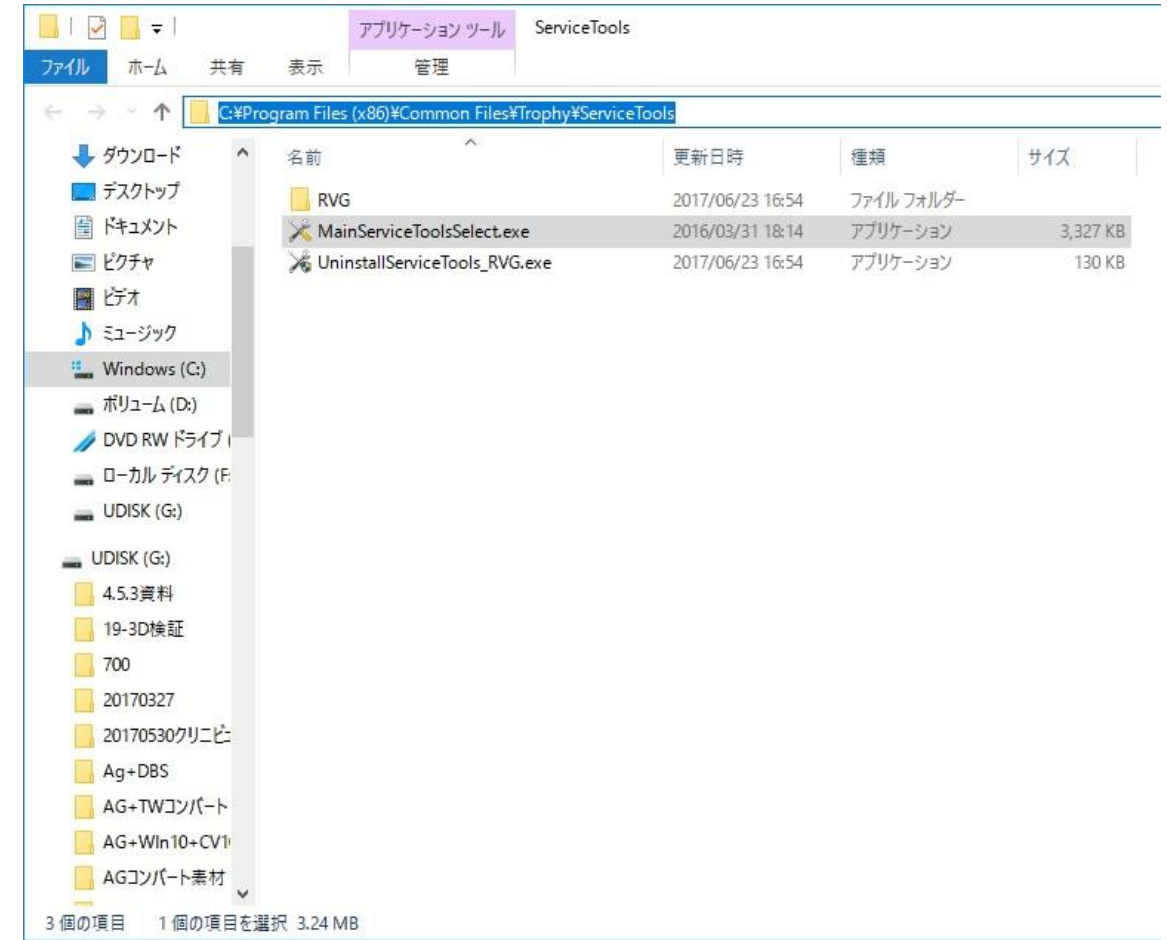


②デスクトップにアイコンが無い場合は、下記exeをダブルクリックします。


C:\Program Files(x86)\Common Files\Trophy\ServiceTools\MainServiceToolsSelect.exe

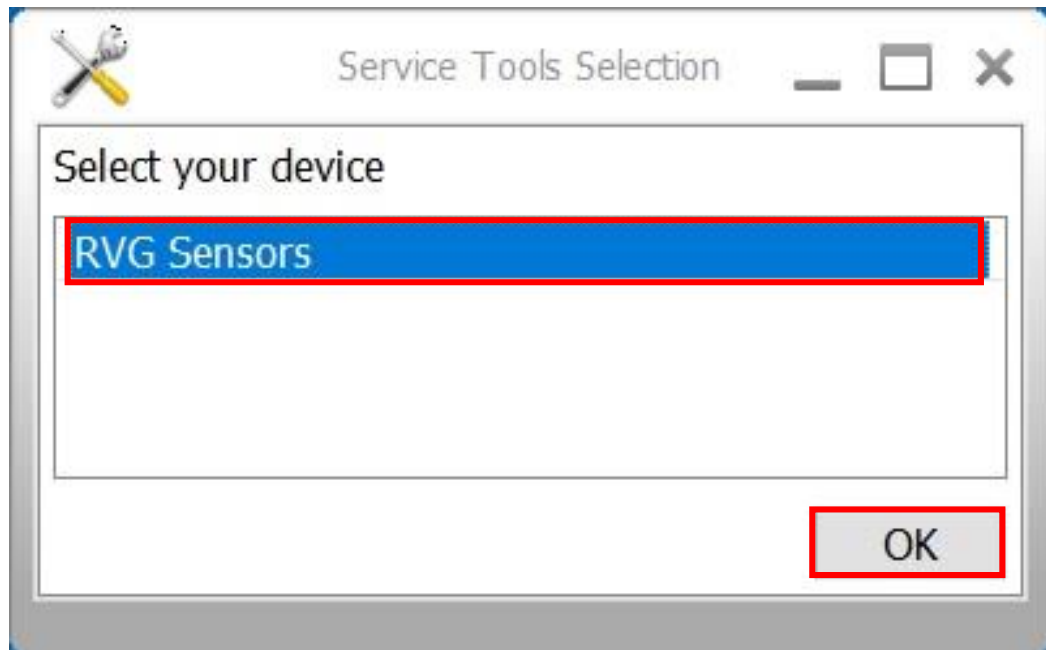


③上記画面が出たらRVG Sensorsを選択し「OK」をクリックします。

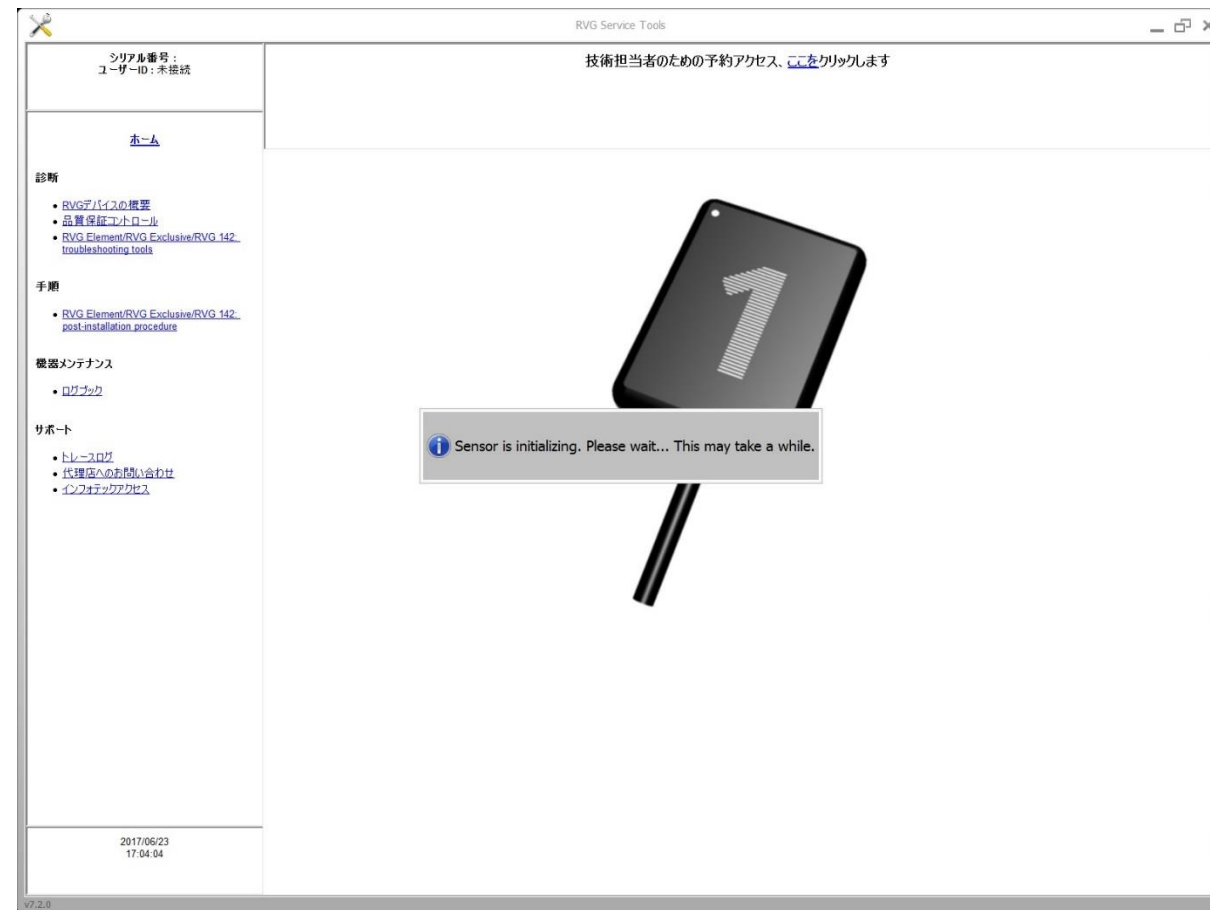

④上記画面が出てエクスクルーシブの情報を読み込みます。

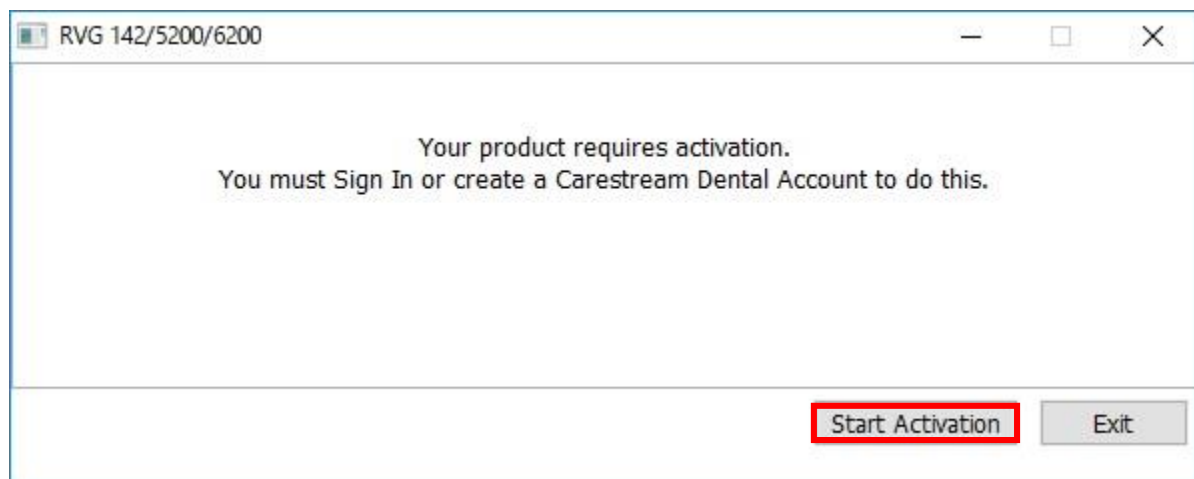

⑤上記画面が出たら「Start Activation」をクリックします。

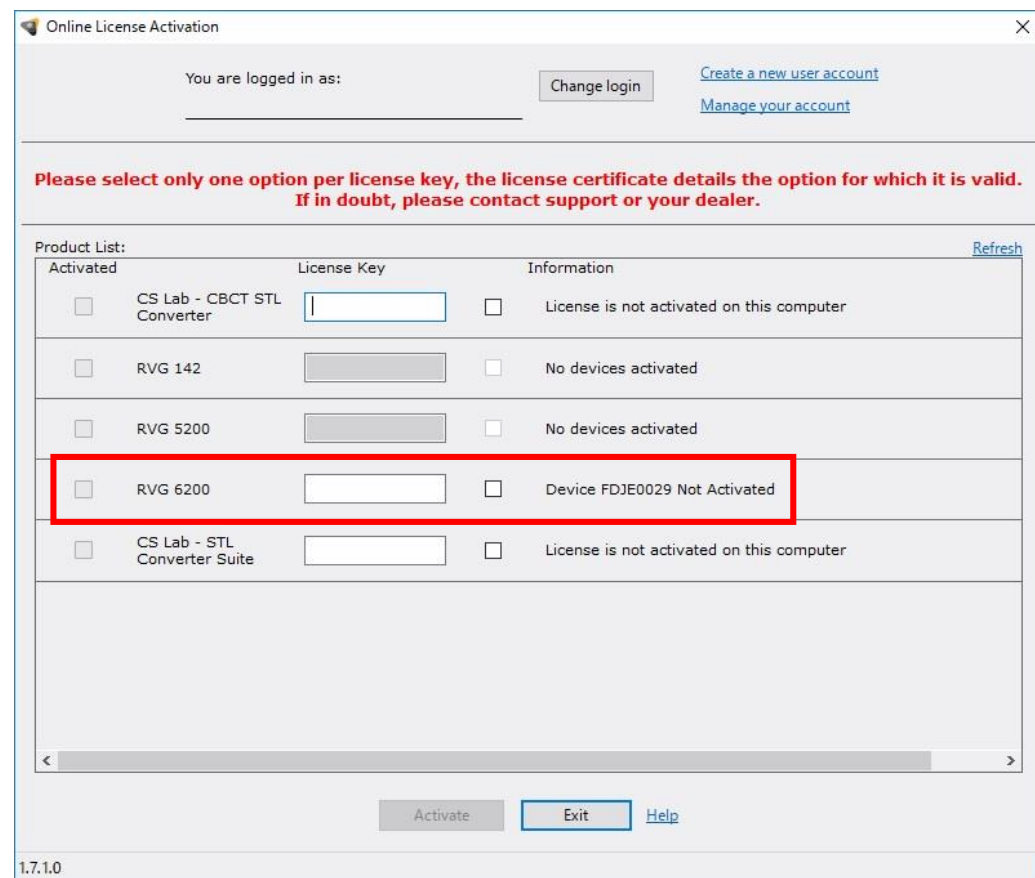

⑥アカウント入力後、通常通りアクティベートができます。

※RVG6200の欄にライセンスキーを入力します。

手順は以上になります。