


『E1020』が表示された場合の原因と対処方法

●『E1020』が表示された場合の原因と対処方法




挿入口に異物が挟まっている
可能性があります。

本体主電源を長押しで電源を
落とします。

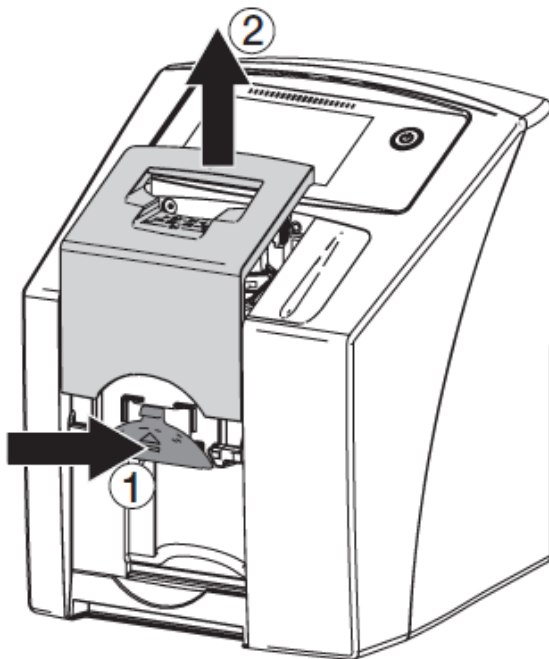

- ①アンロックボタンを押し
- ②カバーを上へ取り外します。

『E1020』が表示された場合の原因と対処方法

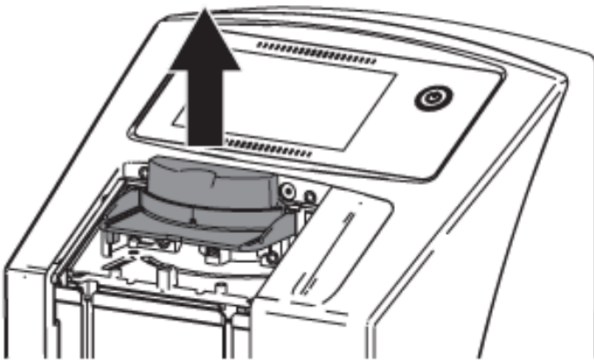

③フィクチャーを上へ取り外します。



挿入口などに異物がないか確認し、異物があれば取り出します。

取り出し後、本体カバーをセットして、本体主電源を投入します。

上記エラーが改善されない場合は
本体装置側の挿入口、ローラーモジュール等が破損している
可能性があります。
大変恐れ入りますが弊社コンタクトセンター
TEL0120-178-148迄 連絡をお願い致します。