


1.コンソール PC の準備

装置本体各部名称

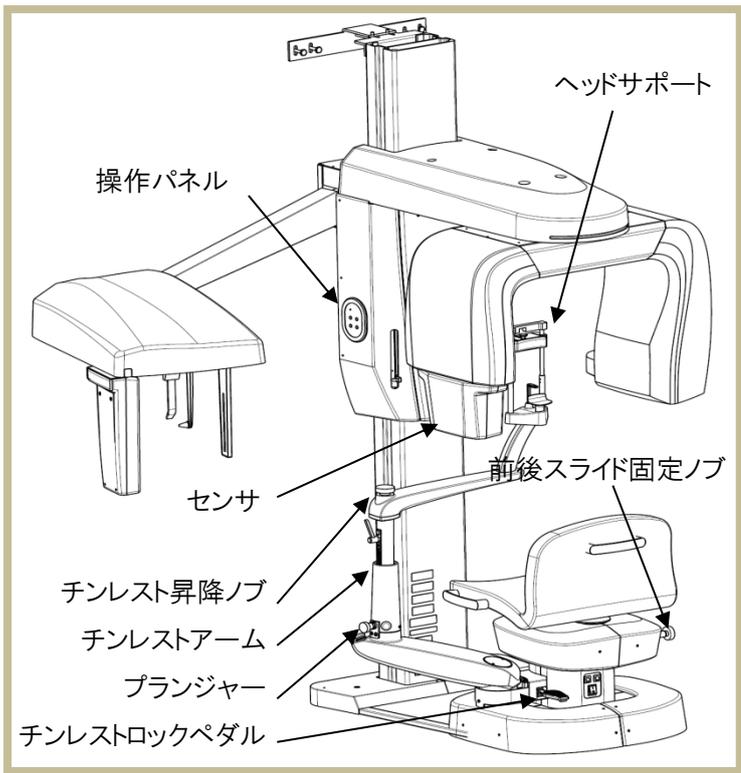

◆「CT スキャン実行」を選択します。




- ◆「患者登録」または、患者選択します。
- ◆患者選択後、目的・担当者を入力し、「確認」をクリックします。
- ◆撮影モードを選択し、「決定」をクリックします。
(アイコンをクリックし、スキャンモードが選択します。)




- ◆チンレストアームを開放位置にセットします。
- ◆「スキヤナ初期化」、「OK」の順にクリックします。
- ◆スキヤナの初期化が始まります。
- ◆初期化が終了します。
- ◆患者導入して、チンレストアームを撮影位置にセットします。


◆開放位置

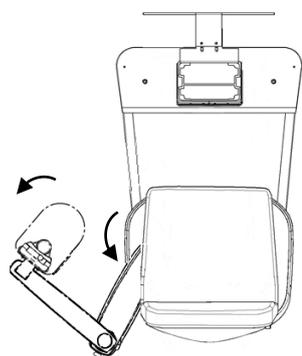


◆ペダルを踏みアームを回転

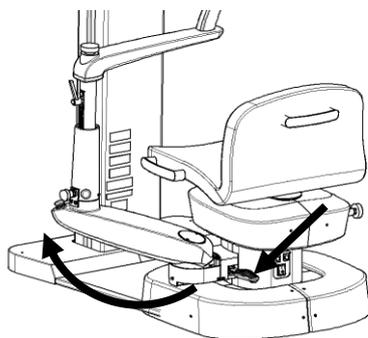


◆プランジャーを引く
◆アームを閉じる

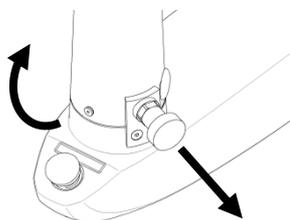

◆撮影位置

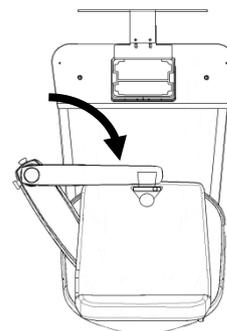

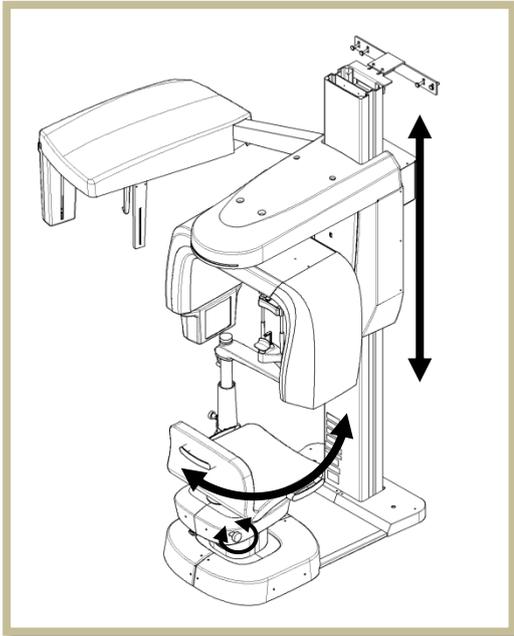


2.患者導入

- ◆患者を椅子に座らせ支柱に向くように椅子を回転させ固定します。
- ◆チンレストアームを撮影位置にセットします。
- ◆撮影範囲に操作パネルの「UP/DOWN」ボタンで高さを調整します。

3.位置付け・固定


- ◆ヘッドサポートで頭部を固定します。
- ◆患者導入完了をクリックして「OK」をクリックします。
- ◆PCの操作に従い、側面位置付け:スカウト撮影→「次へ」
正面位置付け:スカウト撮影→「次へ」の順に位置付けをします。
(操作ボックスを使用し位置付けの調整をします。)

ヘッドサポート

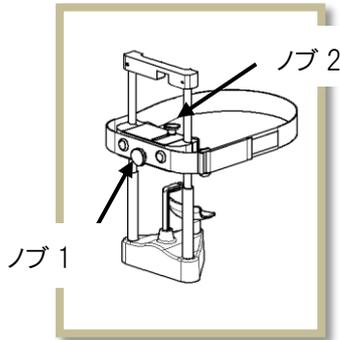


- ノブ1:前頭部ホルダ 高さ調整
- ノブ2:前頭部ホルダ 前後調整

操作ボックス

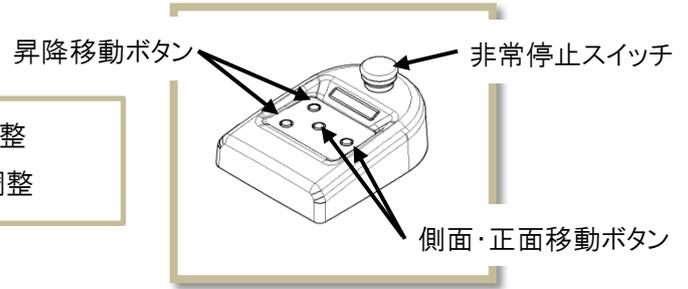

◎側面位置付け:スカウト撮影

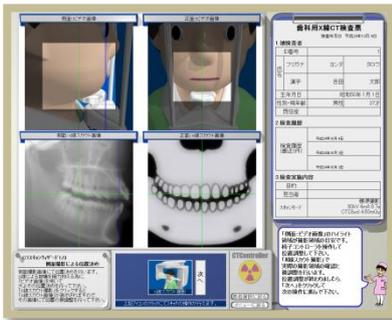

◎正面位置付け:スカウト撮影




◎CT スキャン実行



4.CT スキャンの実行

- ◆X線 CT スキャンをクリックして「OK」をクリックします。
- ◆撮影が始まります。
- ◆撮影終了後、「OK」をクリックして患者を退出させます。
- ◆「次の撮影を実行」or「メニューに戻る」を選択します。

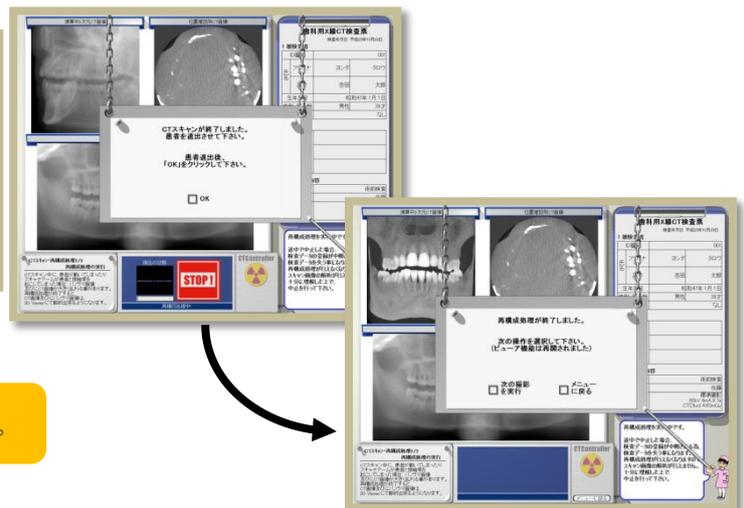

※撮影中は患者を常に監視し、危険と判断したら直ちに撮影を中止してください。