


## 画像データをUSBメモリにコピーしたい

※予め記憶媒体（USBフラッシュメモリなど）をPCに接続し認識させておきます。

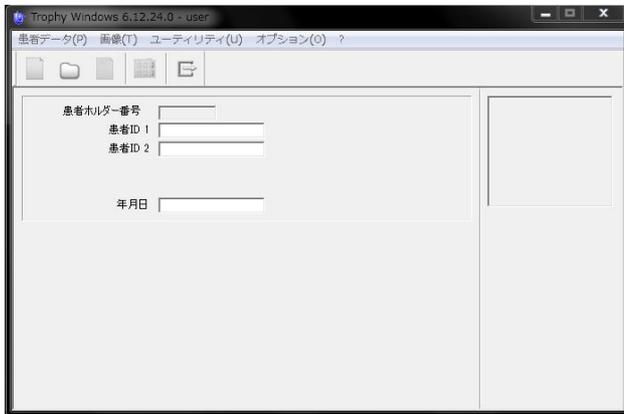

- ① 「検索」で患者さん呼び出して、  
撮影画面 に切り替えます。



- ② 「履歴を開く」で画像一覧を表示します。




- ③ 移動したい画像を左クリックして緑色の枠を  
付けます。

※複数枚ある際は該当する画像に緑色の枠を  
付けて下さい。


- ④ 右下の「送信先」を左クリックします。

## 画像データをUSBメモリにコピーしたい

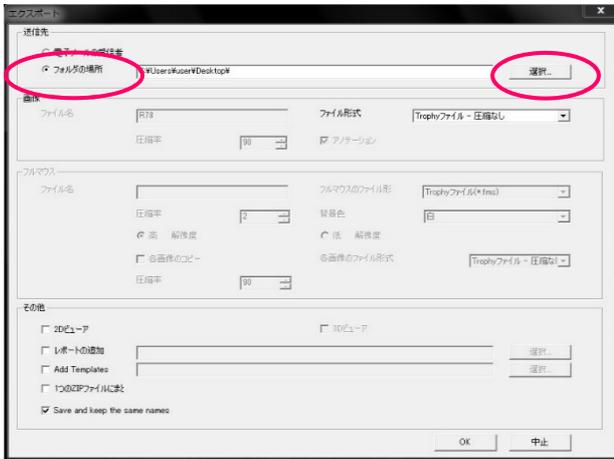


⑤ 左上の「送信先」では「フォルダの場所」の方にチェックを入れます。

⑥ フォルダの場所を設定しますので右側の「選択」を左クリックします。

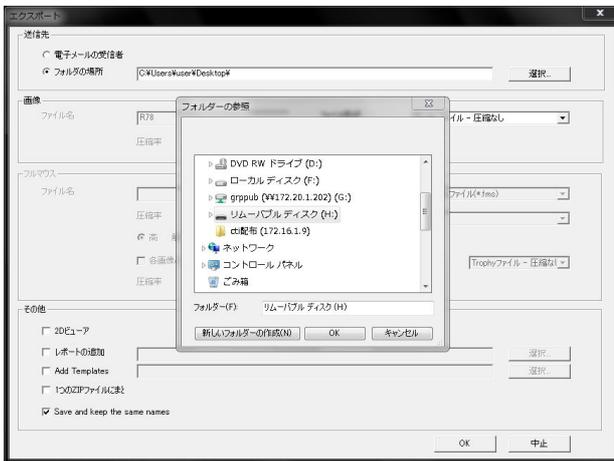


⑦ 「フォルダの参照」画面では「リムーバブルディスク」を選択します。

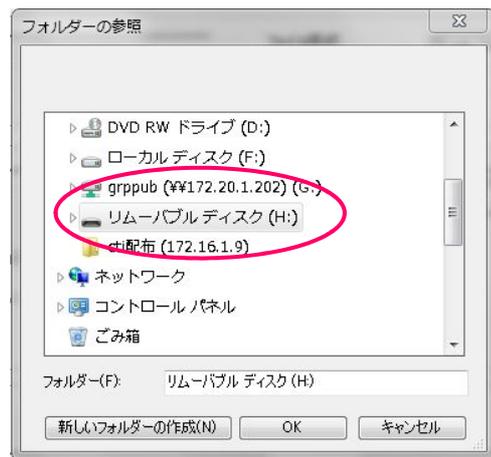

⑧ ファイル形式は欄の右側にある▼ボタンを左クリックします。一覧が表示しますので「JPEGファイル」を選択します。

⑨ 下部の「OK」を左クリックします。

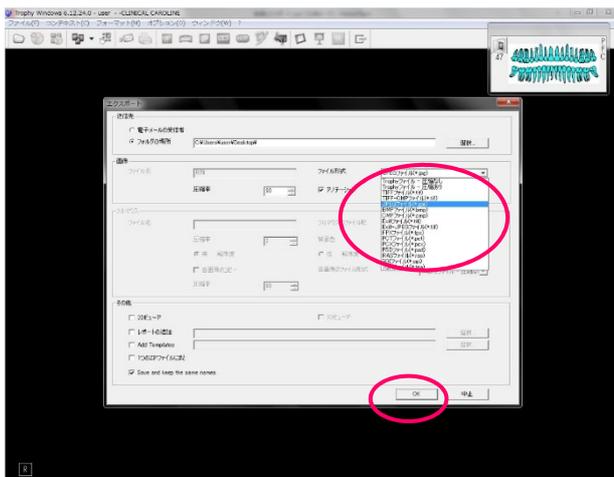

※ファイル形式「Trophyファイル圧縮なし」はTrophyWindowsオリジナルの形式になります。専用ソフトTrophyWindows上で画像表示が可能です。（移動作業の際に指定します。）