

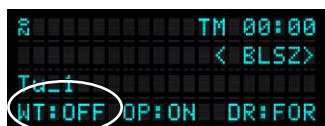


3.6.6 スプレスイッチ（スプレ切替）

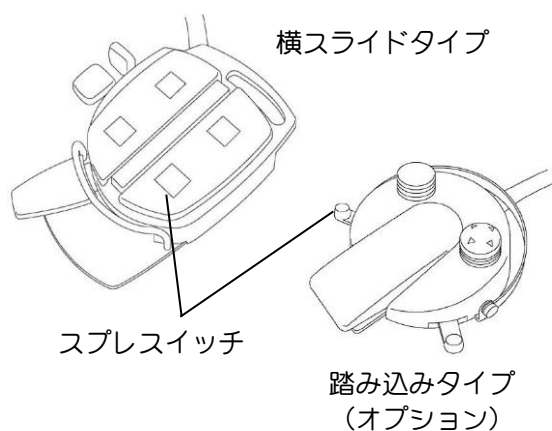

スプレ設定表示

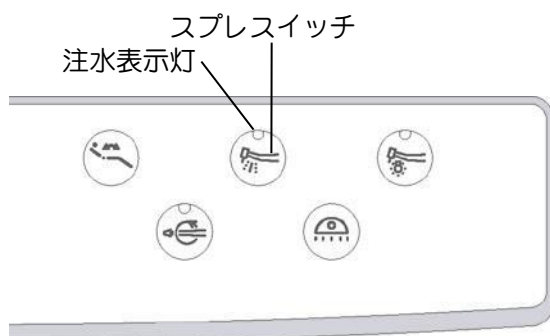


ハンガからエアタービンハンドピースまたはマイクロモータ、スケーラを取り上げます。フットコントローラまたはテーブルパネルスイッチのスプレスイッチを押すと切替ができます。注水がONの時には、エアタービンハンドピースまたはマイクロモータ回転中、スケーラ発振中に注水します。停止後、注水は停止します。

補足：インスツルメントごとの設定が行えます。ただし、スケーラは注水設定で使用してください。

補足：テーブルパネルが表示器仕様の場合
注水 WT：ON
注水なし WT：OFF
と表示されます。

補足：テーブルパネルが標準仕様の場合
注水設定のときに注水表示灯が点灯します。

3.6.7 スプレエアーの調整

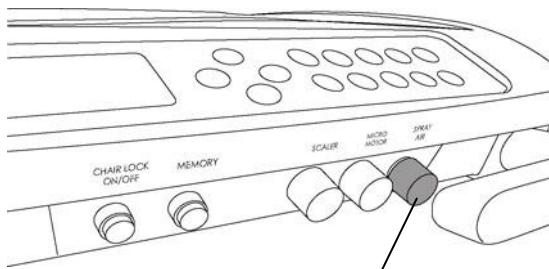


スプレエアー
調整ツマミ

スプレエアー調整ツマミは、テーブルの下面に付いています。スプレエアーは、調整ツマミを時計方向へ回すと少なくなり、反時計方向に回すと多くなります。

注記：スプレエアー調整ツマミを調整すると、タービン、マイクロモータの注水量が変化することがあります。

3.6.8 エアタービンハンドピース・マイクロモータの水量調整

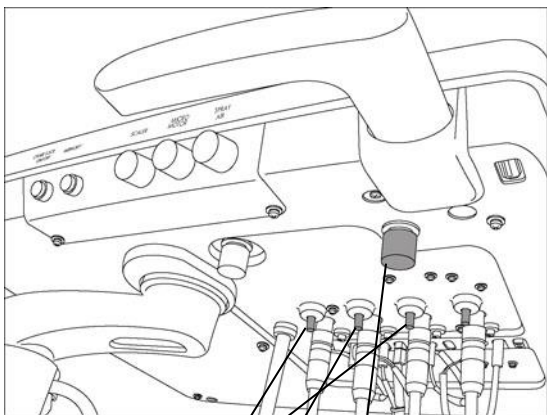

エアタービン用

マイクロモータ用

シリンジ用

水量調整ツマミ

注水量の調整ツマミは、テーブルの下面に付いています。注水量は、水量調整ツマミを時計方向へ回すと少なくなり、反時計方向に回すと多くなります。