

## ユニ 技工バーナー ノズル取替方法について

ユニ技工バーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
お納めしたバーナーは LPG仕様のノズルが取り付けられています。都市ガスまたは天然ガスで使用する時は次の手順でノズルの交換を行ってください。

### 準備するもの

ペンチ

細いドライバー（千枚通し）

ウエス



### ノズル取替の手順

1. ノズル空気穴にドライバーを入れ左方向に回しバーナー部を外す。



2. ノズルにウエスをかぶせノズルに傷をつけないように左方向に回し、ノズルを外す。



3. ガスに合ったノズルを選び、取り外した手順の逆に取り付けする。  
締め付けは軽く止まる程度とします。